



Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

10A45/T

< 100 Kg / 220 liber

Posuvný dvojitý adaptér s oboustranným
pyramidovým osazením – titan

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1



Obr. 2



22A2/M5x8
5 Nm

Obr. 3

1. Účel použití

Posuvný adaptér 10A45/T se užívá výhradně k protetickému ošetření dolních končetin. Podle klasifikačního systému firmy Streifeneder je doporučován pro pacienty s tělesnou hmotností do 100 kg.

2. Popis

Posuvný adaptér 10A45/T představuje spojení mezi dvěma adaptéry a modulární stehenní nebo bérceovou protézou firmy Streifeneder. Vedle funkce jako dvojitý adaptér (jako 10A60) jsou možné další translační nastavení lůžka protězy (Obr.1 a 2).

3. Nastavení posuvu

Translační nastavení je možno alternativně provádět ve frontální a sagitální rovině. Horní část adaptéru lze po rybinovém vedení posunout asi o 11 mm, a pak fixovat šrouby 22A3/M6x8 (Obr.2).

Použijte momentový klíč 173P11. Dotahovací moment 15 Nm.

Posuvná dráha je omezena dorazovým šroubem 22A2/M5x8 (Obr.3). Pro nastavení v opačném směru posuvu je nutno ho přemístit.

Použijte momentový klíč 173P10. Dotahovací moment 5 Nm.

Bez dorazového šroubu 22A2/M5x8 je užívání posuvného adaptéru nepřipustné!

Při dokončování protězy zajistěte šrouby pomocí Loctite 118P35.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný adaptér 10A45/T odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.