



CE

Obuv pro odlehčení přednoží

200R1 Model „Venus“

201R1 Model „Merkur“

205R1 Model „Jupiter“

1 Všeobecná doporučení



Vážení zákazníci,
lékař Vám předepsal vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku, obuv pro odlehčení přednoží, která byla vyrobena v souladu s posledními znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje. Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a berte na vědomí zejména bezpečnostní pokyny.



200R1 "Venus" krátké provedení, bezpečnostní kryt přednoží objednejte samostatně



201R1 "Merkur" s dlouhou polstrovanou vložkou



205R1 "Jupiter" s dlouhou polstrovanou vložkou a dodatečným suchým zipem na přednoží

2 Oblast použití

Hlavním úkolem obuvi pro odlehčení přednoží je mírně zvednutá podrážka v oblasti přednoží (záporný podpatek). To zajišťuje rozložení a zmírnění tlaku při chůzi, čímž se zlepšuje hojení v oblasti přednoží. Obuv obepíná patu a oblast hlezna měkce polstrovaným svrškem a opatkem. Pásky suchého zipu drží chodidlo v určeném místě a brání sklouzávání nohy z obuvi.

Vnitřní podšívka i polstrovaná vložka jsou vybaveny antibakteriální úpravou na bázi amonium-silanové sloučeniny a brání růstu určitých bakterií (např. *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*).

2.1 Indikace

- poranění v oblasti přednoží spojená s onemocněním diabetes mellitus
- uzávěry periferních artérií (nedokrevnost)
- další rány bez rozlišení indikace v oblasti přednoží
- pooperační a traumatické stavy



Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními v oblasti přednoží jsou otlaky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat nohy, bandáže nebo ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů či otázek, zpomalení či přerušení hojení rány (“komplikace“), kontaktujte prosím svého lékaře nebo vyškolený personál v prodejně zp.

2.2 Kontraindikace

- Nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy od tlaku
- Nenoste přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku (před aplikací chraňte pokožku ponožkou a poranění obvazem)
- Nepoužívejte při nestabilních zlomeninách či výskytu diabetické neuro-osteoartropatie (tj. Charcotova noha)
- Použití pouze s berlemi!
- Max. hmotnost pacienta: 120kg

3 Technická data 3.1

Velikostní tabulka obuvi

„Venus“

Velikost	Vnitřní délka	Obj. číslo
36 – 38	cca. 160 mm	200R1/S
39 – 42	cca. 175 mm	200R1/M
43 – 46	cca. 190 mm	200R1/L
47 – 51	cca. 205 mm	200R1/XL

„Merkur“

Velikost	Vnitřní délka	Vnitřní šířka	Obj. číslo
31 – 33	cca. 220 mm	cca. 87 mm	201R1/XS
34 – 36	cca. 240 mm	cca. 91,5 mm	201R1/S
37 – 39	cca. 260 mm	cca. 96 mm	201R1/M
40 – 42	cca. 280 mm	cca. 100,5 mm	201R1/L
43 – 45	cca. 300 mm	cca. 105 mm	201R1/XL
46 – 48	cca. 320 mm	cca. 109,5 mm	201R1/XXL

„Jupiter“

Velikost	Vnitřní délka	Vnitřní šířka	Obj. číslo
31 – 33	cca. 220 mm	cca. 87 mm	205R1/XS
34 – 36	cca. 240 mm	cca. 91,5 mm	205R1/S
37 – 39	cca. 260 mm	cca. 96 mm	205R1/M
40 – 42	cca. 280 mm	cca. 100,5 mm	205R1/L
43 – 45	cca. 300 mm	cca. 105 mm	205R1/XL
46 – 48	cca. 320 mm	cca. 109,5 mm	205R1/XXL

Všechny typy je možné nosit na levé i pravé noze.

3.2 Příslušenství

“Venus“

Ochranný kryt přednoží se
suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

200R10/S	36 – 38
200R10/M	39 – 42
200R10/L	43 – 46
200R10/XL	47 – 51

“Merkur“

Ochranný kryt přednoží se
suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

201R1/XS	31 – 33
201R1/S	34 – 36
201R1/M	37 – 39
201R1/L	40 – 42
201R1/XL	43 – 45
201R1/XXL	46 – 48

Nastavitelný ochranný kryt

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

200R14/S	36 – 38
200R14/M	39 – 42
200R14/L	43 – 46
200R14/XL	47 – 51

“Jupiter“

Ochranný kryt přednoží se
suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

205R10/XS	31 – 33
205R10/S	34 – 36
205R10/M	37 – 39
205R10/L	40 – 42
205R10/XL	43 – 45
205R10/XXL	46 – 48

3.3 Materiály

Obuv pro odlehčení přednoží je vyrobena z následujících materiálů:

Podrážka:	PU-tvarovaná podrážka	100%	PU	Polyurethan
Vložka:	pěna:	100%	EVA	Ethylen vinyl acetát
	potah:	100%	PES	Polyester
Vrchní materiál a podšívka:		100%	PES	Polyester
Suchý zip:		100%	PA	Polyamid

4 Aplikace

Poznámka: Před prvním nasazením obuvi nasadíte na nohu pacienta přiložený plastový sáček. Tím se zabrání kontaminaci obuvi bakteriemi v případě, že je třeba vyměnit velikost.

Na obuvi pro odlehčení přednoží rozepněte všechny suché zipy a umístěte poraněnou nohu do obuvi na vložku patou na doraz k opatku. Poté obuv zavřete a dostatečně utáhněte všechny suché zipy tak, aby noha nemohla vyklouznout. Obuv pro odlehčení přednoží je možné nosit na levé i pravé noze.

5 Technické údaje



Typ "Venus" s bezpečnostním krytem na ochranu přednoží před nárazy a následným zraněním. Bezpečnostní kryt lze nastavit na délku chodidla. Pro individuální přizpůsobení/léčbu dle indikace, lze upravovat podrážku obuvi broušením a lepením. Výrobce nebo dodavatel ale, vzhledem k těmto změnám nenese odpovědnost za případné škody nebo následné škody, resp. kontraindikace.

6 Údržba



- Před praním uzavřete všechny suché zipy
- Nesušte na topení

7 Použití

Obuv pro odlehčení přednoží 200R1, 201R1, 205R1 vyžaduje individuální nastavení na pacienta dle indikace. Veškeré nastavení musí být provedeno kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání obuvi pro odlehčení přednoží je určena ošetřujícím lékařem. Je závislá na účelu použití a použitých materiálech. Zohledněte prosím, že zdravotnický prostředek podléhá přirozenému opotřebení. Obrátte se na svého lékaře nebo technika, pokud by používání již nebylo možné.

8 Garance

8.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tyto produkty, obuv pro odlehčení přednoží 200R1, 201R1 a 205R1 je garance 3 měsíce.

8.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení. Výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými techniky, přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození. To samé platí i pro distributora produktu.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedené výrobky jsou v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR).

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz