


2J10/E50

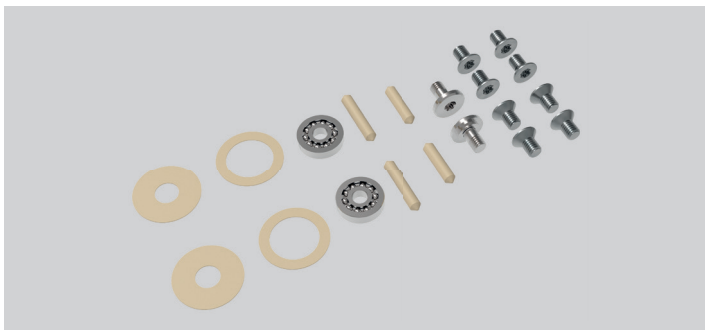

**Sada náhradní dílů pro Artikon.genu
Ortotický systém / sadu kolenních kloubů**

CZ Návod k použití

Technické údaje

Sada náhradních dílů pro: 2J10L / 2J10R / 2J11 / 2J10LV / 2J10RV / 2J11V

Popis:

Sada obsahuje:

2 x Ložiskový šroub M5

2 x Tlumič nárazu vel. 16

2 x Tlumič nárazu vel. 20

2 x Kuličkové ložisko


2 x Samolepící vodící kroužek (vnitřní Ø 8)

2 x Samolepící vodící kroužek (vnitřní Ø 16)

8 x Torx-šroub

1 x Speciální montážní mazivo


Výměna kuličkového ložiska

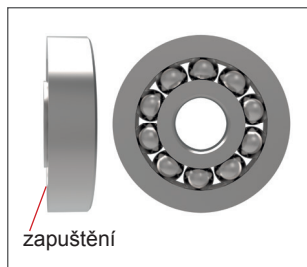

Pozor!

Kuličkové ložisko je asymetrické.

Vnitřní a vnější kroužky jsou na jedné straně v jedné rovině. Zatímco vnitřní kroužek na druhé straně oproti vnějšímu mírně vystupuje.

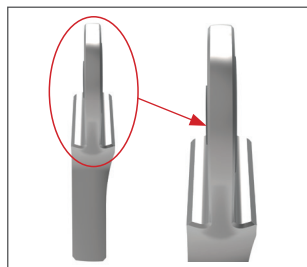


Důležité:


Kuličkové ložisko musí být zatlačeno tak, že zapuštěný vnější kroužek je zarovnaný se zadní stranou kloubu.

Po vtlačení vnitřní kroužek na jedné straně mírně vystupuje, stejně tak vystupují i vnitřní a vnější kroužky na protilehlé straně kloubu.


Lepení / montáž samolepících vodících kroužků

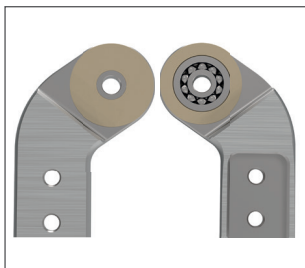

Očistěte povrch okolo kuličkových ložisek pomocí Loctite 7063 a bavlněného hadříku. Nechte oschnout a samolepící vodící kroužky přilepte tak, jak je znázorněno na obrázku.

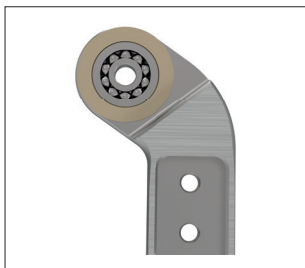

Naneste Speciální montážní mazivo, obj. č. 22J100, na otevřenou stranu kuličkového ložiska.

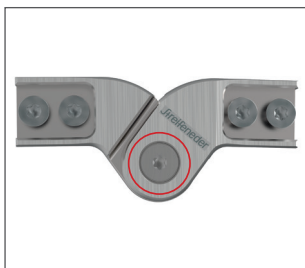

Opatrně zasuňte oba spoje kloubu do sebe a utáhněte ložiskové šrouby utahovacím momentem **6 Nm**.

Omezení použití: Vzhledem k individuálnímu přizpůsobení a z hygienických důvodů, vezměte, prosím, na vědomí, že tento výrobek je určen pouze pro uživatele, kterému byl indikován. Výrobek nesmí být používán nikým jiným.

Pozor: Upozorňujeme na to, že Artikon.genu Sada kolenních kloubů byla testována a schválena pouze ve spojení se všemi dalšími Streifeneder modulárními díly.

Garance: Následující prohlášení o garanci je platné v souladu s jinými relevantními zákony danými garančními nároky a je od těchto nezávislé. Garance je poskytována namísto jakýchkoli jiných vyjádřených nebo nepřímých vyjádřených garancí nebo vhodných garancí pro konkrétní účel. Odpovídající ověření musí být f. Streifeneder ortho.production GmbH předložena bez žádosti, při uplatnění nároků vyplývajících z této garance.

Podmínky garance: Nároky vyplývající z garance výrobce lze uplatňovat pouze v případě, že daný výrobek byl namontován a seřízen certifikovaným / akreditovaným ortopedickým technikem a v případě, že výrobek byl řádně a pravidelně udržován vyškoleným technikem ve stanovených intervalech - pokud jde o údržbu a předepsané termíny jsou dány f. Streifeneder ortho.production GmbH. Prováděný servis a údržba musí být potvrzeny datem, orazítkovány razítkem a stvrzeny podpisem technika provádějící odborné firmy. Odpovídající ověření musí být f. Streifeneder ortho.production GmbH bez žádosti předány při uplatnění nároků z této garance.

Garanční doba a její omezené trvání: Délka garance od výrobce se liší v závislosti na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Zvláštní podmínky garance tohoto výrobku jsou:

Garanční lhůta 2J10/E50 Sady náhradních dílů pro Artikon.genu kolenní klouby = 12 měsíců

Nároky vyplývající z této garance musí být neprodleně písemně uplatněny u f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo dodavatele, a to nejpozději do 1 měsíce po zjištění nároku dle této garance. Právo uplatňovat nároky na garanci po uplynutí této lhůty je výslovně vyloučeno.

Rozsah garance a vyloučení: Je zaručeno, že výrobek je bez materiálových a výrobních vad.

Garance se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- špatné instalace,
- provozních podmínek,
- nevhodného použití (zejména v rozporu s danými pokyny výrobce),
- běžného opotřebení,
- vnějších vlivů, jako jsou např. vyšší moc nebo zásahy ze strany třetích osob.

Stejně tak nejsou zahrnuty optické vady bez vlivu na funkčnost daného výrobku, rovněž vady vyplývající z kombinace poškozených dílů, použitím dílů neschválených f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo zásahy či opravy prováděné neautorizovaným prodejcem f. Streifeneder ortho.production GmbH.

Záruka nevytváří závazky vůči f. Streifeneder ortho.production GmbH a dodavateli, pokud se jedná o náhradu následné škody nebo poškození jakéhokoli druhu či jiných nároků na náhradu škody. Výjimkou jsou závazné právní předpisy, dle kterých f. Streifeneder ortho.production GmbH nad rámec dobrovolné garance za produkt ručí.

Garanční servis: Jsou-li splněny všechny podmínky této garance, f. Streifeneder ortho.production GmbH na základě vlastního uvážení buď výrobek opraví nebo vymění zdarma.

Likvidace: Výrobek je pro člověka a životní prostředí nezávadný a lze jej recyklovat.

Výrobek musí být zlikvidován nebo zrecyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

**Autorizovaný zástupce
a prodejce na Slovensku:**

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Germany
T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de/op

Prodejce v ČR:

ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz