

Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb


16A10

< 75 kg / 165 liber

Mini laminační disk
pro sérii zámků 300

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de

CE

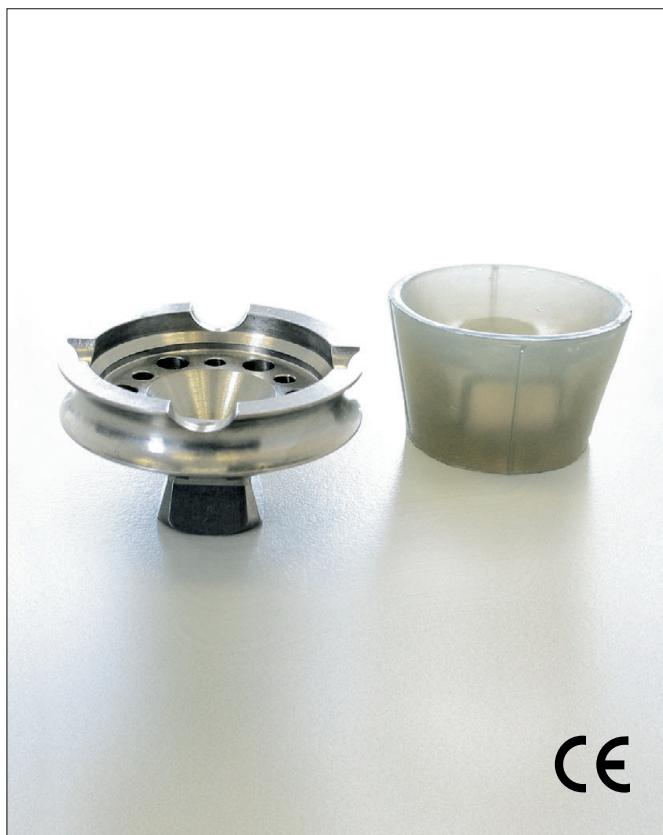

1. Mini laminační disk pro sérii zámků 300

Mini laminační disk o průměru pouhých 47 mm se upevní 6 montážními šrouby k zámku série 300 a zalaminuje. Přitom je pyramida přímo spojena s laminátem a výškou o 6 mm přesahuje zámek.

2. Návod k montáži

Obr. 1

Upevněte mini laminační disk šesti příloženými montážními šrouby k zámku.

Obr. 2

Nasadte laminační krytku 22A12 na pyramidu. Příloženým šroubem s válcovou hlavou a podložkou připevněte zámek k sádrovému pozitivu.

Při armování musí být armovaný materiál v drážce ovázán!

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že mini laminační disk 16A10 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.