



CE

Terapeutická obuv i pro bandážovanou nohu

214R1 Model „Neptun“

215R1 Model „Neptun B“

1 Všeobecná doporučení

214R1/...

215R1/...

Vážení zákazníci,

lékař Vám předepsal vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku terapeutickou obuv "Neptun" nebo "Neptun B", které byly vyrobeny v souladu s posledními znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje.



Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a berte na vědomí zejména bezpečnostní pokyny. Pomůže Vám to k úspěšné léčbě při používání terapeutické obuvi.

2 Oblast použití

Tento typ obuvi je určen k držení nohy včetně objemných obvazů nebo bandáží a chrání před sklouznutím bandáže, prochladnutím a vodou. Terapeutická obuv obejmě celou oblast chodidla a kotníku pomocí měkkého polstrovaní. Suchý zip nad širokým jazykem zabraňuje vyklouznutí chodidla z obuvi. Vyjímatelná polstrovaná vložka pomáhá předcházet otlakům v oblasti chodidla. Obuv lze snadno zešíroka otevřít a díky nastavitelným páskům suchého zipu nabízí odpovídající prostor i pro bandážovanou nohu.

„**Neptun B**“ má navíc extra širokou konstrukci podrážky a lze jej zešíroka otevřít i v oblasti paty a tím zajišťuje velkorysý prostor pro bandážovanou nohu. Vysoký svršek v oblasti hlezna zajišťuje dostatečnou oporu. Zesílená podrážka poskytuje další podporu pro poraněnou nohu.

Vnitřní podšívka i polstrovaná vložka u obou typů jsou vybaveny antibakteriální úpravou na bázi amonium-silanové sloučeniny a brání růstu určitých bakterií (např. *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*).

2.1 Indikace

- Poranění v oblasti nohy a hlezna spojená s onemocněním diabetes mellitus
- Uzávěry periferních artérií (nedokrevnost)
- Další rány bez rozlišení indikace v oblasti nohy a hlezna
- pooperační a traumatické stavy

U „Neptun B“ navíc:

- Rehabilitace lymfedému, bérkové vředy, chronické onemocnění kůže, obezita.



Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními v oblasti nohy a hlezna jsou otlaky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat nohy, bandáže a ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů či otázek, zpomalení či přerušení hojení rány (“komplikace”), kontaktujte prosím svého lékaře nebo vyškolený personál v prodejně zp.

2.2 Kontraindikace

- Nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy od tlaku.
- Nepoužívejte přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku (před aplikací chraňte pokožku ponožkou nebo obvazem).

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

Měrný bod: velikost obuvi

214R1“Neptun”, standardní verze

Velikost	Vnitřní délka	Vnitřní šířka	Strana	Obj. číslo
36	cca. 243 mm	cca. 93 mm	Levá	214R1/36L
37	cca. 249 mm	cca. 94,5 mm	Levá	214R1/37L
38	cca. 256 mm	cca. 96 mm	Levá	214R1/38L
39	cca. 263 mm	cca. 97,5 mm	Levá	214R1/39L
40	cca. 269 mm	cca. 99 mm	Levá	214R1/40L
41	cca. 276 mm	cca. 100,5 mm	Levá	214R1/41L
42	cca. 283 mm	cca. 102 mm	Levá	214R1/42L
43	cca. 290 mm	cca. 103,5 mm	Levá	214R1/43L
44	cca. 296 mm	cca. 105 mm	Levá	214R1/44L
45	cca. 303 mm	cca. 106,5 mm	Levá	214R1/45L
46	cca. 309 mm	cca. 108 mm	Levá	214R1/46L
47	cca. 315 mm	cca. 109,5 mm	Levá	214R1/47L
48	cca. 322 mm	cca. 111 mm	Levá	214R1/48L
36	cca. 243 mm	cca. 93 mm	Pravá	214R1/36R
37	cca. 249 mm	cca. 94,5 mm	Pravá	214R1/37R
38	cca. 256 mm	cca. 96 mm	Pravá	214R1/38R
39	cca. 263 mm	cca. 97,5 mm	Pravá	214R1/39R
40	cca. 269 mm	cca. 99 mm	Pravá	214R1/40R
41	cca. 276 mm	cca. 100,5 mm	Pravá	214R1/41R
42	cca. 283 mm	cca. 102 mm	Pravá	214R1/42R
43	cca. 290 mm	cca. 103,5 mm	Pravá	214R1/43R
44	cca. 296 mm	cca. 105 mm	Pravá	214R1/44R
45	cca. 303 mm	cca. 106,5 mm	Pravá	214R1/45R
46	cca. 309 mm	cca. 108 mm	Pravá	214R1/46R
47	cca. 315 mm	cca. 109,5 mm	Pravá	214R1/47R
48	cca. 322 mm	cca. 111 mm	Pravá	214R1/48R

215R1 "Neptun B", široká verze

Velikost	Vnitřní délka	Vnitřní šířka	Strana	Obj. číslo
35 – 36	239 mm	99 mm	Levá	215R1/36L
37 – 38	252 mm	102 mm	Levá	215R1/38L
39 – 40	265 mm	105 mm	Levá	215R1/40L
41 – 42	279 mm	108 mm	Levá	215R1/42L
43 – 44	292 mm	111 mm	Levá	215R1/44L
45 – 46	305 mm	114 mm	Levá	215R1/46L
47 – 48	319 mm	117 mm	Levá	215R1/48L
49 – 50	331 mm	120 mm	Levá	215R1/50L
35 – 36	239 mm	99 mm	Pravá	215R1/36R
37 – 38	252 mm	102 mm	Pravá	215R1/38R
39 – 40	265 mm	105 mm	Pravá	215R1/40R
41 – 42	279 mm	108 mm	Pravá	215R1/42R
43 – 44	292 mm	111 mm	Pravá	215R1/44R
45 – 46	305 mm	114 mm	Pravá	215R1/46R
47 – 48	319 mm	117 mm	Pravá	215R1/48R
49 – 50	331 mm	120 mm	Pravá	215R1/50R

3.2 Příslušenství

214R1 "Neptun", standardní verze

Polstrovaná vložka, 3 mm z latexové pěny, textilní potah, asymetrický tvar

Velikost	Strana	Obj. číslo	Strana	Obj. číslo
36	Levá	214R12/36L	Pravá	214R12/36R
37	Levá	214R12/37L	Pravá	214R12/37R
38	Levá	214R12/38L	Pravá	214R12/38R
39	Levá	214R12/39L	Pravá	214R12/39R
40	Levá	214R12/40L	Pravá	214R12/40R
41	Levá	214R12/41L	Pravá	214R12/41R
42	Levá	214R12/42L	Pravá	214R12/42R
43	Levá	214R12/43L	Pravá	214R12/43R
44	Levá	214R12/44L	Pravá	214R12/44R
45	Levá	214R12/45L	Pravá	214R12/45R
46	Levá	214R12/46L	Pravá	214R12/46R
47	Levá	214R12/46L	Pravá	214R12/47R
48	Levá	214R12/48L	Pravá	214R12/48R

215R1 "Neptun B" široká verze

Polstrovaná vložka, 8 mm, z materiálu EVA, potah z veluru, asymetrický tvar

Velikost obuvi	Strana	Obj. číslo	Strana	Obj. číslo
35 – 36	Levá	215R11/36L	Pravá	215R11/36R
37 – 38	Levá	215R11/38L	Pravá	215R11/38R
39 – 40	Levá	215R11/40L	Pravá	215R11/40R
41 – 42	Levá	215R11/42L	Pravá	215R11/42R
43 – 44	Levá	215R11/44L	Pravá	215R11/44R
45 – 46	Levá	215R11/46L	Pravá	215R11/46R
47 – 48	Levá	215R11/48L	Pravá	215R11/48R
49 – 50	Levá	215R11/50L	Pravá	215R11/50R

3.3 Materiály

Terapeutická obuv je vyrobena z následujících materiálů:

214R1“Neptun”

Podrážka: PU - tvarovaná podrážka	100%	PU	Polyurethan
Polstrovaná vložka:	100%	ED	Latex
Vrchní materiál a podšívka:	100%	PES	Polyester
Suchý zip:	100%	PA	Polyamid
Textilní svršek:	100%	PES	Polyester

215R1“Neptun B”

Podrážka: PU - tvarovaná podrážka	100%	PU	Polyurethan
Polstrovaná vložka:	100%	EVA	Ethylen vinyl acetát
Vrchní materiál a podšívka:	100%	PES	Polyester
Suchý zip:	100%	PA	Polyamid
Textilní svršek:	100%	PA	Polyamid

4 Aplikace

Poznámka: před prvním vyzkoušením nasadte na nohu pacienta přiložený plastový sáček. Tím se zabrání kontaminaci obuvi, v případě že je potřeba vyměnit velikost.

Na terapeutické obuvi rozepněte všechny suché zipy a umístěte poraněnou nohu na vložku patou na doraz k opatku. Poté obuv zavřete a dostatečně utáhněte všechny suché zipy tak, aby noha nemohla vyklouznout.

5 Technické údaje



Pro individuální přizpůsobení/léčbu dle indikace lze upravovat podrážku obuvi broušením a lepením. Výrobce nebo dodavatel ale, vzhledem k těmto technickým změnám, nenese odpovědnost za případné škody nebo následné škody, resp. kontraindikace.

6 Údržba



- Před praním uzavřete všechny suché zipy
- Nesušte na topení

7 Použití

Terapeutická obuv 214R1 a 215R1 vyžaduje individuální nastavení na pacienta dle indikace. Veškeré nastavení musí být provedeno kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání je určena ošetřujícím lékařem. Je závislá na účelu použití a použitých materiálech. Zohledněte prosím, že zdravotnický prostředek podléhá přirozenému opotřebení. Obráťte se na svého lékaře nebo technika, pokud by používání již nebylo možné.

8 Garance

8.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tyto produkty, terapeutická obuv "Neptun" 214R1 a "Neptun B" 215R1, je garance 3 měsíce.

8.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení. Výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození. To samé platí i pro distributora produktu.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedené výrobky jsou v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR).

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz