



Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

16A30

<100 kg / 220 liber

Laminační kotva pro
sérii zámků 300

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1



Obr. 2

1. Laminační kotva pro sérii zámků 300

Laminační kotva se připevní 6 montážními šrouby k sérii zámků 300 a zalaminuje se. Přitom je pyramida přímo spojena s laminátem a minimalizuje výšku konstrukce.

2. Návod k montáži

Obr. 1

Upevněte laminační kotvu šesti příloženými montážními šrouby k zámku.

Obr. 2

Nasaďte laminační krytku 22A12 na pyramidu. Příloženým šroubem s válcovou hlavou a podložkou připevněte zámek k sádrovému pozitivu.

Při upevňování musí být materiál v drážce kotvy provázán!

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG zaručuje rozšířenou garanci po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že laminační kotva 16A30 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.