



PeroSupport.tec

PeroSupport.pro

Peroneální karbonové ortézy

197P4
197R6

Obsah

1 Všeobecné informace a doporučení.....	3
2 Principy účinku.....	3
2.1 Indikace.....	3
2.2 Kontraindikace.....	3
3 Technická data.....	4
3.1 Velikostní tabulka.....	4
3.2 Materiály.....	5
4 Aplikace.....	5
5 Údržba.....	6
6 Použití.....	6
6.1 Omezení použití.....	6
6.2 Doba použití.....	6
7 Garance.....	6
7.1 Délka garance.....	6
7.2 Rozsah garance.....	6
8 Prohlášení o Shodě.....	7
9 Likvidace.....	7

1 Všeobecné informace a doporučení

197P4/... PeroSupport.tec
197R6/... PeroSupport.pro (se zesílenou objímkou bérce)

Vážení Zákazníci,

Váš lékař vám předepsal vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku PeroSupport.tec či PeroSupport.pro peroneální ortézu, která byla vyrobena v souladu s posledními znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje.



Postupujte prosím podle doporučení tohoto návodu. Pomůže vám to k úspěšné léčbě. Váš odborný ortoticko-protetický technik nebo ošetřující lékař vám rád zodpoví všechny vaše otázky o používání PeroSupport.tec a PeroSupport.pro peroneálních ortéz.

2 Principy účinku

Peroneální ortéza PeroSupport.tec

PeroSupport.tec peroneální ortéza podporuje funkci zvedání nohy a omezuje plantární flexi. Poskytuje plynulou a dynamickou chůzi na rovném i nerovném terénu. Toho je dosaženo konstrukcí vyztužené pružiny na dorsální straně, která je v pevném spojení s pružnou planžetou chodidla.

Peroneální ortéza PeroSupport.pro

Kromě terapeutických účinků jako u ortézy PeroSupport.tec, PeroSupport.pro zabraňuje také supinačnímu postavení nohy stejně jako postranímu sklouznutí nohy (laterální podpora).

2.1 Indikace

- Peroneální paréza (padavá noha)
- Slabá dorsální flexe nohy
- Zánět hlezenního kloubu
- Pooperační péče po ruptuře Achillovi šlachy
- Malpozice hlezenního kloubu v souvislosti s oslabenou dorsální flexí

2.2 Kontraindikace

- Alergie na užití materiály
- Nenoste přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku
- Tělesná hmotnost větší než 120 kg
- Deformace nohy nebo hlezenního kloubu
- Otoky a dilatace kůže
- Smyslové poruchy, např. diabetická polyneuropatie
- Syndrom diabetické nohy / vřed
- Těžké poruchy krevního oběhu / lymfatické otoky

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

Určení velikosti: Velikost boty pacienta

PeroSupport.tec

Velikost	Velikost boty	Strana	Barva	Obj. číslo
S	36 – 39	levá	černá	197P4/L1
M	39 – 42	levá	černá	197P4/L2
L	42 – 45	levá	černá	197P4/L3
XL	45 – 48	levá	černá	197P4/L4
S	36 – 39	pravá	černá	197P4/R1
M	39 – 42	pravá	černá	197P4/R2
L	42 – 45	pravá	černá	197P4/R3
XL	45 – 48	pravá	černá	197P4/R4

Příslušenství k PeroSupport.tec

Popis	Barva	Obj. číslo
1 sada polstrovacích pelot pro pravou i levou stranu (včetně 10-ti koleček suchého zipu)	černá	197P6

PeroSupport.pro

Velikost	Velikost boty	Strana	Barva	Obj. číslo
S	36 – 39	levá	černá	197R6/L1
M	39 – 42	levá	černá	197R6/L2
L	42 – 45	levá	černá	197R6/L3
XL	45 – 48	levá	černá	197R6/L4
S	36 – 39	pravá	černá	197R6/R1
M	39 – 42	pravá	černá	197R6/R2
L	42 – 45	pravá	černá	197R6/R3
XL	45 – 48	pravá	černá	197R6/R4

Příslušenství k PeroSupport.pro

Popis	Velikost	Barva	Obj. číslo
1 sada polstrovacích pelot (včetně 12-ti koleček suchého zipu)	S + M	černá	197R7/1
1 sada polstrovacích pelot (včetně 12-ti koleček suchého zipu)	L + XL	černá	197R7/2

3.2 Materiál

Epoxidovou pryskyřicí předem impregnovaná uhlíková vlákna (Prepreg materiál)

Polstrování:	100%	PE	Polyester
Suché zipy:	100%	PA	Polyamid

Upozornění




Ortély PeroSupport jsou vyrobeny z předem impregnovaného uhlíkového vlákna epoxidovou pryskyřicí (Prepreg materiál) a nedají se tepelně tvarovat. Jakékoli vrtání do planžety a připojené vyztužené pružiny je zakázáno. Vrtání přerušuje orientaci vláken a stabilita ortély by nemohla být garantována.


PeroSupport ortély mohou být užívány pacienti s hmotností do 120 kg. Pacienti s vyšší hmotností musí být vybaveni individuálně vyrobenou ortézou.

4 Aplikace

PeroSupport ortély jsou k dispozici ve čtyřech různých výškách pro levou i pravou nohu.

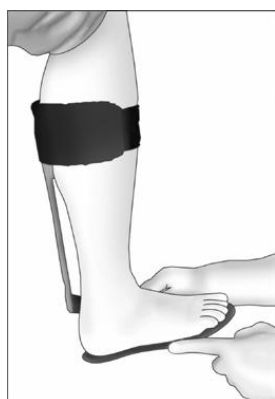

Pro individuální úpravu velikosti lze planžetu chodidla odbrousit. Pro úpravu šířky planžety chodidla je zapotřebí brousit stejnoměrně z obou stran. Pro zabránění podráždění pokožky je nutné, aby odbroušené hrany byly zaobleny a vyhlazeny.

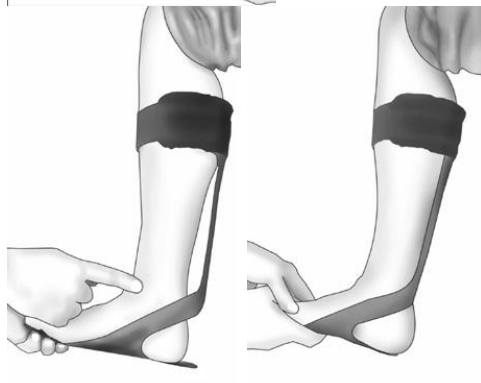

Vyztužená pružina mezi planžetou chodidla a dorsální objímkou bérce nesmí být příliš blízko mediální straně hlezna. Zkrácením patní části planžety chodidla se připojení vyztužené pružiny posune dorsálně, což zabraňuje přímému kontaktu s hlezenním kloubem.

Pro zvýšení komfortu nohy, lze vlepít ortopedickou vložku na planžetu ortély.



Upozornění

Pokud by byly peroneální ortély PeroSupport.tec a PeroSupport.pro ve výjimečných situacích přetíženy (např. při skákání z velké výšky) mohlo by dojít k jejich zlomení. Při jízdě autem může ortéza zabránit náhlému brzdění v neočekávaných situacích.



Upozornění

Hlezenní ortély PeroSupport.tec a PeroSupport.pro nenoste přímo na nechráněnou pokožku. Punčochy nebo ponožky zvyšují komfort při nošení.

5 Údržba

Sada polstrování se může prát v ruce ve vlažné vodě za pomoci antibakteriálních čisticích prostředků. Nechejte schnout pouze na vzduchu. Nedávejte schnout na topení nebo do sušičky. Hlezenní ortézy mohou být čištěny vhodným dezinfekčním prostředkem pro tento povrch (e. g. Bacillol® 25 od Bode, terralin® ochrana od Schülke).

6 Použití

Hlezenní ortézy Perosupport.tec a PeroSupport.pro vyžadují kvalifikované a individuální nastavení na pacienta dle dané indikace. Nastavení musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

6.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

6.2 Doba používání

Doba používání je určena ošetřujícím lékařem.

7. Garance

7.1 Délka Garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku.

V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tyto produkty PeroSupport.tec 197P4 a Perosupport.pro 197R6 je garance 6 měsíců.

7.2 Rozsah Garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, nebo pod jejich vedením, aplikován na pacienta.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen, nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly. Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho.

Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození.

To samé platí i pro distributora produktu.

8 Prohlášení o shodě

Firma Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že uvedené výrobky hlezenní ortézy PeroSupport.tec 197P4 a PeroSupport.pro 197R6 jsou konformní s hlavními požadavky a ustanoveními směrnice 93/42/EEC.

9 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce :

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:

Ortho - Aktiv spol. s r. o.
Husova 54
538 54 Luže
tel. +420 469 671 430
mobil technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
technik@protetika-ortho-aktiv.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz