

Silikonové návleky-Liner

- dobře se čistí a udržují díky povrchu s uzavřenými póry
- paroprostupné
- velice dobrá snášenlivost s pokožkou, silikon působí antialergicky
- dobře drží tvar
- nízká podélná tažnost
- kompresní vlastnosti působí pozitivně na pahýl
- umožňují včasné vybavení pacienta
- dodávají se v různých provedeních a tloušťkách materiálu
- je možné zvláštní vyhotovení s látkovým vyztužením s délkou matrice až do 18 cm



Skin-SilGel

Silikonový gel
měkký, obzvláště vhodný pro citlivé pahýly, s ošetřující složkou aloe vera



Comfort-SilGel

Silikonový gel
měkký, vynikající odtlumení a bezpečná stabilita, s ošetřujícími kosmetickými složkami



Two-Color-Sil

Silikonový gel
měkký, vyvážený co do komfortu a pevnosti ošetřující pokožku



Clear-Sil-Pro

Silikon
měkký, komfortní, vysoká stabilita a jistota, ošetřující pokožku



Clear-Sil

Silikon
pevný, vysoká stabilita a pevnost při dobrém odtlumení, ošetřující pokožku



Control-Sil

Silikon
pevný a zesílený, ideální směrová stabilita a vysoká kontrola ovládání objímky, ošetřující pokožku



Aktiv-Sil

Silikonový gel
pevný, vysoká stabilita a jistota, aktivní péče o pokožku s ošetřující složkou aloe vera a mentolem

Tipy pro praxi:

Před první aplikací (narolováním) se návlek musí očistit přípravkem k mytí pahýlu Skin-Care-Washlotion 10H2, aby se odstranily možné nečistoty dané výrobním postupem a zabránilo se tak podráždění pokožky.

Návlek by se neměl krátit méně, než 10 cm nad horním koncem objímky.

Denní čištění návleku přípravkem k mytí pahýlu Skin-Care-Washlotion 10H2 slouží jako prevence podráždění pokožky a prodlužuje jeho životnost.

Při silném zatížení můžete návlek denně pootočit vždy o několik centimetrů jedním směrem. Zabráníte tím jednostrannému opotřebení.