

Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

30S4/P 50S4/P

Těsnicí trn k sérii zámků 300 a 500



Návod k montáži pro 30S1/30S2/30S3, pro připojení s 16A30/16A10/50S1/50S2/50S3

1. Dodávka obsahuje:



Pro sérii 300 (obr. 1):
– těsnicí trn série 300 □ obj. č. 30S4/E3
– O-kroužky □ obj. č. 30S4/E4

Pro sérii 500 (bez obrázku):
– těsnicí trn série 500 □ obj. č. 50S1/E1
– O-kroužky □ obj. č. 30S4/E4

Obr. 1

2. Těsnicí trn se vyznačuje lehkou a rychlou montáží a spolehlivě utěsní objímku resp. zámek.

3. Montáž

3.1 Montáž zámků Clutch-Lock (30S1/50S1) a Shuttle Lock (30S2/50S2) (obr. 2). Další obrázky zachycují postup montáže těsnicího trnu do zámků 30S3 (Easy-Lock).



Obr. 2



Obr. 3

3.1.1. Příprava těsnicího trnu (obr. 3)
Nasuňte přibalené O-kroužky na trn. Dbejte na to, aby O-kroužky zapadly do pro ně určených drážek. Pro snazší montáž do zámků postříkejte O-kroužky sprejem 117P20.



Obr. 4

3.1.2 Montáž těsnicího trnu v zámku (obr. 4)

Pozor: Před montáží těsnicího trnu odmontujte blokovací jednotku. Poškození O-kroužků může ovlivnit těsnost celého systému.



Obr. 5

Obr. 5 Těsnicí trn vtačte opatrně palcem do otvoru a dotlačte jej až na doraz.



Obr. 6

Obr. 6 V kombinaci s těsnicím trnem lze použít silikonový návlek bez distálního připojení nebo i s distálním připojením.



Obr. 7

Obr. 7 Namontujte ventilovou jednotku a opatrně ji dotáhněte.

⚠️ Pozor: Dbejte při tom pokynů v návodu pro blokovací ventilovou jednotku zámku.



Obr. 8

3.2 Montáž zámků Easy-Lock (30S3 / 50S3) (obr. 8)

Následující obrázky zachycují postup montáže těsnicího trnu do zámků 30S3 (Easy-Lock).



Obr. 9

3.2.1 Demontáž zámků Easy-Lock (obr. 9)

Povolte opatrně dvoumilimetrovým šestihřanným T-klíčem 173P3/2 oba šroubky-červíky.

⚠️ Pozor: Červíky vytočte jen k zarážce.




Obr. 10

Obr. 10 Vyšroubujte blokovací jednotku pomocí montážního klíče (10S300) z pouzdra zámků.




Obr. 11

Obr. 11
 **Pozor: Pružinku a podložku dobře uschovejte pro případné zpětné přestavění.**



Obr. 12

Obr. 12 Nasuňte přibalené O-kroužky na těsnicí trn teprve tehdy, až jej prostrčíte vodícím pouzdem.

 **Pozor: Dodržte, prosím, tento pracovní postup, jinak se mohou O-kroužky poškodit.**



Obr. 13

Obr. 13 Postříkejte O-kroužky sprejem 117P20, abyste si další montáž ulehčili.




Obr. 14

Obr. 14 Vtlačte těsnicí trn s vodícím pouzdem opatrně do pouzdra zámku. Pro demontáž těsnicího trnu slouží otvor v něm se závitem M4. Pro vytažení trnu použijte vhodný šroub, popřípadě i kleště.



Obr. 15

 **Pozor: Nastavte polohu vodícího pouzdra trnu podle obr. 15, aby bylo možné správně namontovat uzavírací kryt.**




Obr. 16

Obr. 16 Přišroubujte uzavírací kryt zámku Easy Lock klíčem pro vnitřní matice 165P5 do vodícího pouzdra zámku. Špičky klíče nasadíte do hlaviček šroubků-červíků.



Obr. 17

Obr. 17 Namontujte ventilovou jednotku, opatrně ji dotáhněte.

 **Pozor: Dbejte při tom pokynů v návodu pro ventilovou jednotku zámku.**

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 12 měsíců, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že těsnicí trn k sérii zámků 300 a 500 – 30S4/P, 50S4/P odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.

Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel (0049) 8141 6106-0
Fax (0049) 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Ortho - Aktiv spol. s r. o.
Husova 54
538 54 Luže
tel. (00420) 469 671 430
fax (00420) 469 671 070
mobil (00420) 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz