

Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

10A6/S

< 100 Kg / 220 liber

Lůžkový adaptér – ušlechtilá ocel

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de

CE



Obr. 1

Obr. 1


Seřizovací šrouby vymontujte z lůžkového adaptéru.



Obr. 2

Obr. 2

Naolejovanou ochrannou krytkou 22A10 proximálně stlačte, až distálně zapadne.

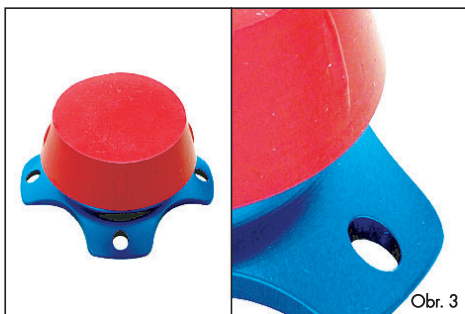

Obr. 3

Obr. 3

Distálně nastavte namazanou laminační krytku 22A10 tak, aby označení ze stran bylo nad děrami šroubů a zároveň ukazovalo polohu pyramidy, a zatlačte ji.

Technické informace

Hmotnost:	130 g
Kompatibilitní:	pro laminování bérce
Zatížitelnost:	100 kg
Dotahovací moment:	M8 ≙ 15 Nm
Inspekce:	12 měsíců

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že lůžkový adaptér z ušlechtilé oceli 10A6/S odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.