



# Streifeneder

Orthopädische  
Produktion & Vertrieb

## 10A41/A

< 75Kg / 165 liber

Posuvný adaptér, s laminační  
kotvou – aluminium

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering  
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50  
office@striefeneder.de • www.striefeneder.de



Obr. 1



22A2/M6x30  
15 Nm

Obr. 2



22A2/M8x12  
10/15 Nm

Obr. 3



Silikonový dummy  
10A41/AE3

Obr. 4

### 1. Účel použití

Posuvný adaptér 10A41/A se užívá výhradně k protetikému ošetření dolních končetin. Podle klasifikačního systému firmy Streifeneder je doporučován pro pacienty s tělesnou hmotností do 75 kg.

### 2. Popis

Posuvný adaptér 10A41/A zajišťuje spojení mezi pyramidou a lůžkem protězy. Vedle této funkce je možno navíc provádět translační nastavení lůžka protězy (Obr. 1 a 2).

### 3. Manipulace se stavěcími šrouby

Pomocí čtyř stavěcích šroubů 22A2/M8x12 je možno přehledně provádět statické korektury kdykoli během konstrukce, při zkoušce, ale i po dokončení protězy.

Při výměně jednoho modulu nebo při demontáži je původně nastavená pozice ponechána, jsou-li vyšroubovány pouze dva vedle sebe se nacházející šrouby, a sice ty původně nejvíce zašroubované (Obr. 3).

### Pozor!

Při utahování šroubů 22A2/M8x12 dodržujte následující postup:

Nejprve rovnoměrně přitáhněte šrouby momentovým klíčem 173P11 silou 10 Nm. Při dokončování protězy je zajistěte pomocí Loctite 118P35 a jeden po druhém utáhněte na 15 Nm.

### 4. Nastavení posuvu

Translační nastavení je možno alternativně provádět ve frontální a sagitální rovině. Horní část adaptéru lze po rybinovém vedení posunout asi o 9 mm, a pak fixovat šrouby 22A2/M6x30 (Obr.2).

Použijte momentový klíč 173P11, dotahovací moment 15 Nm.

Při dokončování protězy zajistěte šrouby pomocí Loctite 118P35.

### 5. Pokyn pro práci:

Na ochranu rybinového vedení je možno použít Plastilin 113P7 nebo silikonový dummy 10A41/AE3 (Obr. 4).

### Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

### Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný adaptér 10A41/A odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.