



Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

10A43/T75

< 100Kg / 220 liber

Posuvný dvojitý adaptér – titan


F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de




Obr. 1



Obr. 2

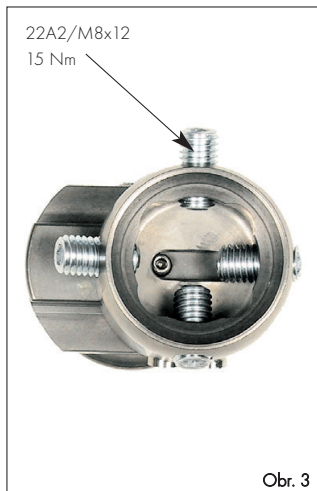

Obr. 3

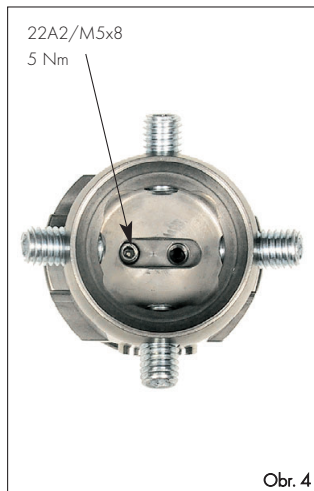

Obr. 4

1. Účel použití

Posuvný adaptér 10A43/T75 se užívá výhradně k protetikému ošetření dolních končetin. Podle klasifikačního systému firmy Streifeneder je doporučován pro pacienty s tělesnou hmotností do 100 kg.

2. Popis

Posuvný adaptér 10A43/T75 představuje spojení mezi dvěma pyramidami a modulární stehenní nebo bérceovou protézou firmy Streifeneder. Vedle funkce jako dvojitý adaptér (jako 10A50) jsou možné další translační nastavení lůžka protězy (Obr.1 a 2).

3. Manipulace se stavěcími šrouby

Pomocí čtyř stavěcích šroubů 22A2/M8x12 je možno přehledně provádět statické korektury kdykoli během konstrukce, při zkoušce, ale i po dokončení protězy. Při výměně jednoho modulu nebo při demontáži je původně nastavená pozice ponechána, jsou-li vyšroubovány pouze dva vedle sebe se nacházející šrouby, a sice ty původně nejvíce zašroubované (Obr. 3).

K jejich přitážení použijte momentový klíč 173P11, dotahovací moment 15 Nm.

4. Nastavení Posuvu

Translační nastavení je možno alternativně provádět ve frontální a sagitální rovině. Horní část adaptéru lze po rybinovém vedení posunout asi o 11 mm, a pak fixovat šrouby 22A3/M6x8 (Obr.2).

Použijte momentový klíč 173P11. Dotahovací moment 15 Nm.

Posuvná dráha je omezena dorazovým šroubem 22A2/M5x8 (Obr.4). Pro nastavení v opačném směru posuvu je nutno ho přemístit.

Použijte momentový klíč 173P10. Dotahovací moment 5 Nm.

Bez dorazového šroubu 22A2/M5x8 je užívání posuvného adaptéru nepřijatelné!

Při dokončování protězy zajistěte šrouby pomocí Loctite 118P35.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určenému účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný adaptér 10A43/T75 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.