



CE

125 kg

10A16/S

CZ Rotační adaptér

Obsah

1	Technická data	3
2	Popis a funkce	3
2.1	Oblast použití	3
2.2	Konstrukce	3
2.3	Funkce	3
3	Stavba	4
4	Technické údaje.....	4 – 5
5	Údržba / Servis	6
6	Použití	6
6.1	Omezení použití	6
6.2	Nesprávné použití	6
6.3	Doba použití	6
7	Garance.....	6 – 7
7.1	Délka garance.....	6
7.2	Rozsah garance.....	7
8	Prohlášení o shodě	7
9	Likvidace	7

1 Technická data

Materiál.....	nerezová ocel
Hmotnost.....	193 g
Stavební výška.....	25 mm

Rotační adaptér 10A16/S je schválen pro uživatele stupně aktivity (walky) 1 až 4 a pro maximální hmotnost včetně nošených či vzpíraných břemen do 125 kg.

2 Popis a funkce

2.1 Oblast použití

Rotační adaptér 10A16/S je určen výhradně k vybavení modulárních protéz dolních končetin při stehenní amputaci.



Rotační adaptér 10A16/S není povolen k vybavení modulárních protéz při exartikulaci v kyčelním kloubu.

2.2 Konstrukce

Rotační adaptér 10A16/S spojuje protézové lůžko s modulárními díly protéz dolních končetin. Tím jsou stavební díly otočné a k sobě uzamykatelné pomocí blokovacího mechanismu.

Po uvolnění může být protézové lůžko otočeno o 360°.

2.3 Funkce

Pro rotaci stlačte blokovací tlačítko (viz obr.). K zablokování adaptéru dojde automaticky, a to vždy ve výchozí poloze.



3 Stavba



Rotační adaptér 10A16/S musí být vždy nastaven do protězy blokovacím tlačítkem na mediální nebo laterální pozici.



Rotační adaptér 10A16/S musí být vždy umístěn v protěze přímo nad kolenním kloubem.

4 Technické údaje



Díky klasickému připojení přes pyramidu rotační adaptér 10A16/S umožňuje obvyklé proximální a distální nastavení. K utahování stavěcích šroubů používejte kalibrovaný momentový klíč (obj. číslo 173P11).



Stavěcí šrouby musí být zajištěny pomocí Loctite (obj. číslo 118P35) a utaženy na 15Nm.



Obr. Rotační adaptér 10A16/S

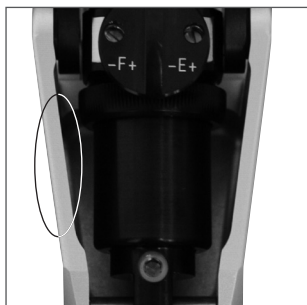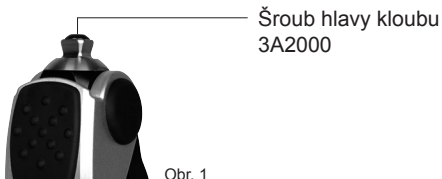

Obr. 2

Při spojení Rotačního adaptéru 10A16/S s kolenním kloubem 3A2000 se sériovým číslem nižším než 12192001 (8mi místné, na levé spodní části těla kloubu viz obr. 2) je nutné šroub hlavy kloubu vyměnit (viz. obr. 1). Šroub je nutné objednat samostatně, obj. číslo 3A2000/E11. To však není zapotřebí pokud objednáte rotační adaptér 10A16/S společně s kolenním kloubem 3A2000.



Je nutné dbát na to, aby rotační adaptér 10A16/S nepřišel do styku s látkami či předměty způsobujícími korozi jako je voda a slaná voda, kyseliny, prach či písek. Nedodržení tohoto doporučení povede ke ztrátě nároku na reklamaci či jakoukoli kompenzaci ze strany Streifeneder ortho.production GmbH.

Prosím, informujte o tom uživatele protězy.

5 Údržba / Servis

Všechny pohyblivé části musí být vizuálně a funkčně kontrolovány po 6-ti měsících, stejně jako všechny pevné modulární komponenty po 12-ti měsících.

6 Použití

Rotační adaptér 10A16/S vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení uživateli v závislosti na indikaci, které musí být provedeno odborným a vyškoleným personálem.

6.1 Omezení použití

Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, berte prosím na vědomí, že výrobek smí být užíván pouze jedním pacientem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí být užíván další osobou.



Upozorňujeme na to, že rotační adaptér 10A16/S byl testován a schválen pouze ve spojení s modulárními a stavebními díly firmy Streifeneder.

6.2 Nesprávné použití

Rotační adaptér 10A16/S je dimenzován pro uživatele aktivity 1 až 4 dle (walky) klasifikačního systému a pro maximální tělesnou hmotnost do 125 kg (včetně vzpíraných a nošených břemen). Není vhodný pro sportovní aktivity, jako například skákání.

6.3 Doba použití

Doba použití je omezena na 5 let.

7 Garance

7.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tento produkt, rotační adaptér 10A16/S, je garance 12 měsíců.

7.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, nebo pod jejich vedením, spojen s ostatními díly protézy a přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození.

8 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený výrobek rotační adaptér 10A16/S je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EWG.

9 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Autorizovaný zástupce a prodejce na Slovensku:

Streifeneder

ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10

82275 Emmering/Germany

Tel +49 8141 6106-0

Fax +49 8141 6106-50

office@streifeneder.de

www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:

ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.

Husova 54

538 54 Luže

Tel. +420 469 671 430

Mob. technik +420 604 669 098

ortho-aktiv@quick.cz

www.protetika-ortho-aktiv.cz