



CE

Obuv pro odlehčení části nohy

Pooperační obuv

202R1 Model „Merkur A“

204R1 Model „Uranus“

216R1 Model „Pluto S“

1 Všeobecná doporučení

Vážení zákazníci,



lékař Vám předepsal vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku v souladu s posledními znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje. Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a berte na vědomí zejména bezpečnostní pokyny.

Obrázky jednotlivých typů



Obj. číslo 202R1
Model **“Merkur A”**
Symetrický, uzavřený,
vyjímatelná vložka,
protiskluzové prvky.



Obj. číslo 204R1 Model
“Uranus”
Symetrický, uzavřený,
vyjímatelná vložka,
integrované
protiskluzové prvky.



Obj. číslo 216R1
Model **“Pluto S”**
Symetrický,
otevřené přednoží,
vyjímatelná vložka,
**nastavitelná oblast
paty**, integrované
protiskluzové prvky.

2 Oblast použití

Hlavním úkolem pooperační obuvi je pevná a mírně zvednutá podrážka v oblasti přednoží (záporný podpatek). To zajišťuje rozložení a zmírnění tlaku při chůzi, čímž se zlepšuje hojení v oblasti přednoží. Pooperační obuv obepíná celou oblast chodidla a hleзна polstrovaným svrškem a opátkem. Pásky suchého zipu drží chodidlo v určeném místě a brání sklouzávání nohy z obuvi. Vyjímatelná polstrovaná vložka pomáhá předcházet otlakům v oblasti chodidla. Obuv lze snadno zešířoka otevřít a díky individuálně nastavitelným páskům suchého zipu nabízí odpovídající prostor i pro bandážovanou nohu.

Pouze model “Pluto S” - přední pásek zabraňuje lateralizaci přední části chodidla, pacient nemůže sklouznout do vnější strany (pokud není pásek potřeba, může být odříznut).

2.1. Indikace

- poranění v oblasti přednoží způsobená diabetes mellitus
- uzávěry periferních artérií (nedokrevnost)
- další rány bez rozlišení indikace v oblasti přednoží
- nestabilní chůze (závrteř, poruchy vidění)



Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními jsou otoky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat nohy, bandáže a ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů či otázek, zpomalení či přerušení hojení rány (“komplikace”), kontaktujte prosím svého lékaře nebo vyškolený personál v prodejně zp.

2.2 Kontraindikace

- Nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy od tlaku.
- Nepoužívejte přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku (před aplikací chraňte pokožku ponožkou a poranění obvazem).
- Nepoužívejte při nestabilních zlomeninách či výskytu diabetické osteoartropatie (tj. Charcotova noha).
- Použití pouze s berlemi!
- Max. hmotnost pacienta: 120kg

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

Velikost	Vnitřní délka	Vnitřní šířka	Obj. číslo “Merkur A”	Obj. číslo “Uranus”	Obj. číslo “Pluto”S
35 – 36	cca. 238 mm	cca. 90 mm	202R1/36	204R1/36	216R1/36
37 – 38	cca. 251 mm	cca. 92,5 mm	202R1/38	204R1/38	216R1/38
39 – 40	cca. 264 mm	cca. 95 mm	202R1/40	204R1/40	216R1/40
41 – 42	cca. 277 mm	cca. 97,5 mm	202R1/42	204R1/42	216R1/42
43 – 44	cca. 290 mm	cca. 100 mm	202R1/44	204R1/44	216R1/44
45 – 46	cca. 303 mm	cca. 102,5 mm	202R1/46	204R1/46	216R1/46
47 – 48	cca. 316 mm	cca. 105 mm	202R1/48	204R1/48	216R1/48
49 – 50	cca. 330 mm	cca. 112,5 mm	202R1/50	204R1/50	216R1/50

“Merkur A, Uranus a Pluto S” je možné nosit na levé i pravé noze.

3.2 Příslušenství

Velikost	“Merkur A“	“Uranus“
	Polstrovaná vložka, 8 mm, vyrobená z materiálu EVA, potah z veluru, symetrický tvar	Polstrovaná vložka, 8 mm, vyrobená z materiálu EVA, potah z veluru, symetrický tvar
	Obj. číslo	Obj. číslo
35 – 36	202R12/36	204R12/36
37 – 38	202R12/38	204R12/38
39 – 40	202R12/40	204R12/40
41 – 42	202R12/42	204R12/42
43 – 44	202R12/44	204R12/44
45 – 46	202R12/46	204R12/46
47 – 48	202R12/48	
49 – 50	202R12/50	204R12/48 204R12/50

Velikost	“Pluto S“	“Pluto S“
	Polstrovaná vložka, symetrický tvar	Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně
	Obj. číslo	Obj. číslo
35 – 36	216R11/36	216R12/36
37 – 38	216R11/48	216R12/38
39 – 40	216R11/40	216R12/40
41 – 42	216R11/42	216R12/42
43 - 44	216R11/44	216R12/44
45 – 46	216R11/46	216R12/46
47 – 48	216R11/48	216R12/48
49 - 50	216R11/50	216R12/50

Vnitřní podšívka i polstrovaná vložka jsou vybaveny antibakteriální úpravou na bázi amonium-silanové sloučeniny a brání růstu určitých bakterií (např. *Staphylococcus*, *Klebsiella pneumoniae*).

3.3 Materiály

Obuv pro odlehčení části nohy je vyrobena z následujících materiálů:

Podrážka:		100% PU	Polyuretan
Vložka:	pěna:	100% EVA	Ethylen vinyl acetát
	potah:	100% PES	Polyester
Vrchní materiál a podšívka:		100% PES	Polyester
Suchý zip:		100% PA	Polyamid

4 Aplikace

Poznámka: před prvním nasazením nasadte na nohu pacienta přiložený plastový sáček. Tím se zabrání kontaminaci obuvi bakteriemi v případě, že je potřeba vyměnit velikost.

Na obuvi rozepněte všechny suché zipy a umístěte poraněnou nohu na vložku patou na doraz k opatku. Poté zavřete obuv a dostatečně utáhněte všechny suché zipy tak, aby noha nemohla vyklouznout. Pokud je pacientem používána obuv pro odlehčení přednoží, lze použít pooperační obuv jako kompenzaci pro rovinu pánve.

5 Technické poznámky



Pro individuální přizpůsobení/léčbu dle indikace lze upravovat podrážku obuvi broušením a lepením. Výrobce nebo dodavatel ale, vzhledem k těmto technickým změnám nenese odpovědnost za případné škody nebo následné škody, resp. kontraindikace.

6 Údržba



- Před praním uzavřete všechny suché zipy
- Nesušte na topení

7 Použití

Pooperační obuv 202R1, 204R1 a 216R1 vyžaduje individuální nastavení na pacienta dle indikace. Veškeré nastavení musí být provedeno kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání pooperační obuvi je určena ošetřujícím lékařem. Zohledněte prosím, že zdravotnický prostředek podléhá přirozenému použití. Též je závislá na účelu použití a použitých materiálech.

8 Garance

8.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tyto produkty, pooperační obuv 202R1, 204R1 a 216R1, je garance 3 měsíce.

8.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení. Výrobek byl certifikovanými/ licencovanými odbornými ortopedickými technikami, přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození. To samé platí i pro distributora produktu.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedené výrobky jsou v souladu s nařízením (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR).

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz