



# Streifeneder

Orthopädische  
Produktion & Vertrieb

## 10A45/A

< 75 Kg / 165 liber

Posuvný dvojitý adaptér s oboustranným  
pyramidovým osazením – aluminium

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering  
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50  
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

### 1. Účel použití

Posuvný adaptér 10A45/A se užívá výhradně k protetikému ošetření dolních končetin. Podle klasifikačního systému firmy Streifeneder je doporučován pro pacienty s tělesnou hmotností do 75 kg.

### 2. Popis

Posuvný adaptér 10A45/A představuje spojení mezi dvěma adaptéry a modulární stehenní nebo bérceovou protézou firmy Streifeneder. Vedle funkce jako dvojitý adaptér (jako 10A60) jsou možné další translační nastavení lůžka protézy (Obr. 1 a 2).

### 3. Posuvné nastavení

Translační nastavení je možno alternativně provádět ve frontální a sagitální rovině. Horní část adaptéru lze po rybinovém vedení posunout asi o 9 mm, a pak fixovat šrouby 22A3/M6x30 (Obr.2).

Použijte momentový klíč 173P11. Dotahovací moment 15 Nm.

Při dokončování protézy zajistěte šrouby pomocí Loctite 118P35.

### Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

### Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný adaptér 10A45/A odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.