

Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

10S4/L

Ventilová jednotka zámku (levotočivý závit)

F. G. Streifeneder KG · Moosfeldstraße 10 · D-82275 Emmering
Telefon +49 8141 6106-0 · Fax 6106-50
office@streifeneder.de · www.streifeneder.de



CE

Obr. 1

Návod k montáži pro:
10S1 série zámků 100
15S1 série zámků 150
30S1 série zámků 300
50S1 série zámků 500

Dodávka obsahuje (obr. 1)
- ventilovou jednotku vakuového zámku (levotočivý závit), obj. č. 10S4/L


1. Nová ventilová jednotka zámku 10S4/L se vyznačuje univerzálností svého použití. Provedení s levotočivým závitem se může zabudovat do následujících typů zámků:

série 100	10S1
série 150	15S1
série 300	30S1
série 500	50S1

Robustní aluminiová konstrukce umožňuje díky standardnímu uchycení (s levotočivým závitem) M16 × 1 pouzder zámků u těchto sérií velmi rychlou a jednoduchou montáž.

⚠️ Pozor: Základním předpokladem pro aplikaci ventilového systému je vzduchotěsnost objímky. Montáž objímky se musí provést podle návodu k jednotlivým typům zámků (Locks). Byl-li použit při stavbě laminační dummy v sérii 300, nelze tento ventil použít. S obzvláštní péčí postupujte při laminování. Dobře utažené fólie před laminováním zabraňují jejím zvrásněním a tím možným netěsnostem objímky.

2. Návod k montáži

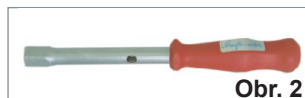

Obr. 2

2.1 Potřebné nářadí (obr. 2)
Šestihranný nástrčkový klíč,
objednací č. 173P15/16.



Obr. 3

2.2 Vymutí blokovací jednotky (obr. 3)

⚠️ Pozor: závit je levotočivý!
Vyšroubujte blokovací jednotku zámku z pouzdra. Očistěte závit i jeho začátek (náběh). Čím čistší bude styková plocha pro O-kroužek, tím se docílí většího podtlaku.



Obr. 4

2.3 Montáž ventilové jednotky (obr. 4)
Zašroubujte opatrně ventilovou jednotku do uchycení pro blokovací jednotku. Zejména u pouzder z plastu opatrně zašroubovávejte, aby se nepoškodil závit.



Obr. 5

2.4 Závěrečná montáž ventilové jednotky (obr. 5)
Zašroubujte ventilovou jednotku nástrčkovým klíčem na doraz.

⚠️ Pozor: Opatrně ji pak rukou dotáhněte, aby se nepoškodil O-kroužek (obj. č. 10S4/E7).
Jemný závit M16x1 nevyžaduje použít Loctite.

3. Pokyny protetického technika pro pacienta:

Po dohodě se svým pacientem jste se rozhodl(a) pro ventilový systém Streifeneder. Hlavní výhody tohoto systému jsou vysoká přilnavost, která je dosažena díky podtlaku. Aby se zachovaly přilnavost a ulpívání pahýlu v lůžku, je důležité těsnicí plochy mezi objímkou a ContexGel kolenní propojovací bandáží (objednací číslo 3S10/...) udržovat v čistotě. To je podmínkou pro udržení podtlaku nutného pro bezpečné spojení pahýlu a protézy.

4. Servis

Zkontrolujte ventilovou jednotku a zámek podle aktivity pacienta minimálně jednou za půl roku na výskyt znečištění. Při vyšší aktivitě pacienta může být nutné zkrátit interval mezi kontrolami. Nečistoty v podobě vláken nebo prach mohou negativně ovlivnit těsnost systému.

5. Náhradní díly a příslušenství (obr. 6)

1. Ventilová jednotka 10S4/L	obj. č. 10S4/L
2. Tlumič kroužek 10S4/E6	obj. č. 10S4/E6
3. O-kroužek 16 mm	obj. č. 10S4/E7
4. Šestihranný nástrčkový klíč	obj. č. 173P15/16



Obr. 6

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu dvanácti měsíců, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že ventilová jednotka zámku (levotočivý závit) 10S4/L odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.