



CE

< 100 kg

10A46/T

CZ Posuvný adaptér
s pyramidou -Titan-

Obsah

1	Technická data	3
2	Popis a funkce	3
2.1	Oblast použití	3
3	Stavba	3 – 4
3.1	Nastavení posuvu	3 – 4
3.2	Instrukce zpracování	4
4	Technické údaje	4
5	Údržba / Servis	5
6	Použití	5
6.1	Omezení použití	5
6.2	Nesprávné použití	5
6.3	Doba použití	5
7	Garance	6 – 7
7.1	Délka garance	6
7.2	Rozsah garance	7
8	Prohlášení o shodě	7
9	Likvidace	7

1 Technická data


Materiál.....	titan
Efektivní výška.....	36 mm
Hmotnost.....	188 g
Max. tělesná hmotnost.....	100 kg

2 Popis a funkce

2.1 Oblast použití

Posuvný adaptér 10A46/T je určen výhradně k vybavení modulárních protéz dolních končetin.

3 Stavba

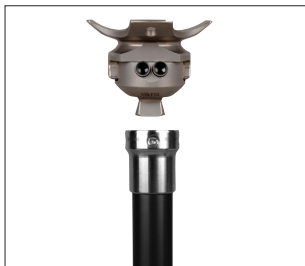

Posuvný adaptér spojuje pahýlové lůžko s modulární stavbou protézy. Tento adaptér umožňuje i dodatečná posuvná nastavení.

3.1 Nastavení posuvu



Nastavení posuvu lze provázet buď ve frontální nebo sagitální rovině. Horní část adaptéru lze posouvat $\pm 11\text{mm}$ nad stabilní vodící částí, ta je pak zajištěna pomocí upínacích šroubů 22A3/M6x8. Tyto šrouby je třeba pečlivě utáhnout momentovým klíčem 173P11 na **15 Nm**.



Rozsah posuvu je omezen hlavou šroubu 22A2/M5x8 (dostupný otvorem pyramidy). Pokud chcete změnit směr posuvu, musí být hlava šroubu přesunuta (ke změně směru posuvu je zapotřebí dorazový šroub vyšroubovat a po změně směru opět zašroubovat).

Dorazový šroub je třeba pečlivě utáhnout momentovým klíčem 173P10 na **5 Nm**.



Upozornění!

Není dovoleno používat posuvný adaptér bez správně umístěného a dotaženého dorazového šroubu 22A2/M5x8!

Všechny šrouby musí být v definitivním nastavení protězy zajištěny pomocí Loctite 118P35.

3.2 Instrukce zpracování



Pro ochranu rybinového čepu použijte plastelíny 113P7 nebo silikonového Dummy 10A41/TE3.

4 Technické údaje



Upozornění!

Je nutné dbát na to, aby posuvný adaptér 10A46/T nepřišel do styku s látkami či předměty způsobujícími korozi jako je voda a slaná voda, kyseliny, prach či písek. Nedodržení tohoto doporučení povede ke ztrátě nároku na reklamaci či jakoukoli kompenzaci ze strany Streifeneder ortho.production GmbH.

Prosím, informujte o tom uživatele protězy.

5 Údržba / Servis

Všechny pohyblivé části musí být vizuálně a funkčně kontrolovány po 6-ti měsících, stejně jako všechny pevné modulární komponenty po 12-ti měsících.

6 Použití

Posuvný adaptér 10A46/T vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení uživateli v závislosti na indikaci, které musí být provedeno odborným a vyškoleným personálem.

6.1 Omezení použití

Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, berte prosím na vědomí, že výrobek smí být užíván pouze jedním pacientem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí být užíván další osobou.



Upozornění!

Upozorňujeme na to, že posuvný adaptér 10A46/T byl testován a schválen pouze ve spojení s modulárními a stavebními díly firmy Streifeneder.

6.2 Nesprávné použití

Posuvný adaptér 10A46/T je dimenzován pro uživatele aktivity 1 až 4 dle (walky) klasifikačního systému a není vhodný pro sportovní aktivity, jako např. skákání.

6.3 Doba použití

Doba použití je omezena na 5 let.

7 Garance

7.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tento produkt, posuvný adaptér 10A46/T, je garance 12 měsíců.

7.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, nebo pod jejich vedením, spojen s ostatními díly protézy a přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození.

8 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený výrobek posuvný adaptér 10A46/T je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EWG.

9 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Autorizovaný zástupce a prodejce na Slovensku:

Streifeneder

ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10

82275 Emmering/Germany

Tel +49 8141 6106-0

Fax +49 8141 6106-50

office@streifeneder.de

www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:

ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.

Husova 54

538 54 Luže

Tel. +420 469 671 430

Mob. technik +420 604 669 098

ortho-aktiv@quick.cz

www.protetika-ortho-aktiv.cz