



CE

Obuv pro odlehčení paty

203R1 Model „Mars“

213R1 Model „Mars S“

1 Všeobecná doporučení



Vážení zákazníci,

lékař Vám předepsal vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku, která byla vyrobena v souladu s posledními znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje, obuv pro odlehčení paty. Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a berte na vědomí zejména bezpečnostní pokyny. Pomůže vám to k úspěšné léčbě.

Obrázky jednotlivých typů



203R1/.. Mars



213R1/..Mars S

2 Oblast použití

Hlavním úkolem této obuvi se zkrácenou podrážkou, pro odlehčení paty, je rozložení tlaku při chůzi na přednoží a zmírnění tlaku v patní části. Tím se zlepšuje hojení v oblasti paty. Obuv obepíná kotník a přednoží měkce polstrovaným svrškem. Pásky suchého zipu drží nohu v určeném místě a brání sklouzávání nohy z obuvi.

Polstrovaná vložka navíc pomáhá předcházet otlakům v oblasti přednoží. Obuv lze snadno zešíroka otevřít a díky nastavitelným páskům suchého zipu nabízí prostor i pro bandážovanou nohu.

Model "Mars S" má novou konstrukci podrážky s možností posunout bod těžiště těla ve směru přednoží pro příjemný odval. Nabízí také možnost přizpůsobit vložku použitím přiloženého mediálního klínu se suchým zipem, variabilně pro pravou nebo levou nohu. Pelotu lze i dodatečně opracovat (např. broušením nebo zvýšením) a to s ohledem na anatomii mediální klenby pacienta. Díky tomu dojde k lepší podpoře a odlehčení paty. Objímka v oblasti kotníku, nártu a přednoží je individuálně nastavitelná.

Vnitřní podšívka i polstrovaná vložka, u obou produktů, jsou vybaveny antibakteriální úpravou na bázi amonium-silanové sloučeniny a brání růstu určitých bakterií (např.: *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*).

2.1 Indikace

- Poranění v oblasti paty způsobená diabetes mellitus
- Uzávěry periferních artérií (nedokrevnost)
- Další rány bez rozlišení indikace v oblasti paty
- Pooperační stavy a traumata v oblasti paty



Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními v patní oblasti jsou otlaky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat nohy, bandáže a ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů či otázek, zpomalení či přerušení hojení rány ("komplikace"), kontaktujte prosím svého lékaře nebo vyškolený personál v prodejně zp.

2.2 Kontraindikace

- Nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy od tlaku.
 - Nenoste přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku (před aplikací chraňte pokožku ponožkou nebo, dle poranění, obvazem).
 - Nepoužívejte při nestabilních zlomeninách či výskytu diabetické neuro-osteoartropatie (např. Charcotova noha).
 - Alergie na užití materiály.
 - Používejte pouze s berlemi!
 - Max. hmotnost pacienta: do 120 kg.
-

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

„Mars“

Velikost	Vnitřní délka	Vnitřní šířka	Obj. číslo
35 – 37	cca. 225 mm	cca. 87 mm	203R1/S
38 – 40	cca. 235 mm	cca. 90 mm	203R1/M
41 – 43	cca. 255 mm	cca. 95 mm	203R1/L
44 – 46	cca. 275 mm	cca. 100 mm	203R1/XL

„Mars S“

Velikost	Vnitřní délka	Vnitřní šířka	Obj. číslo
34 – 36	cca. 240 mm	cca. 87 mm	213R1/S
37 – 39	cca. 260 mm	cca. 91 mm	213R1/M
40 – 42	cca. 280 mm	cca. 100 mm	213R1/L
43 – 45	cca. 300 mm	cca. 105 mm	213R1/XL
46 – 48	cca. 320 mm	cca. 109 mm	213R1/XXL

Všechny typy je možné nosit na levé i pravé noze.

3.2 Příslušenství

"Mars"

Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

200310/S	35 – 37
203R10/M	38 – 40
203R10/L	41 – 43
203R10/XL	44 – 46

"Mars S"

Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

213R10/S	34 – 36
231R10/M	37 – 39
231R10/L	40 – 42
213R10/XL	43 – 45
213R10/XXL	46 – 48

"Mars"

Ochranný kryt paty se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

203R11/S	35 – 37
203R11/M	38 – 40
203R11/L	41 – 43
203R11/XL	44 – 46

"Mars S"

Ochranný kryt paty se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

213R11/S	34 – 36
213R11/M	37 – 39
213R11/L	40 – 42
213R11/XL	43 – 45
213R11/XXL	46 – 48

"Mars S "

Polstrovaná vložka

Obj. číslo	Velikost
------------	----------

213R12/ S	34-36
213R12/M	37-39
213R12/L	40-42
213R12/XL	43-45
213R12/XXL	46-48

3.3 Materiály

Podrážka:	100% TR - tvarovaná podrážka
Vložka:	100% EVA Ethylen vinyl acetát
Polstrovaná vložka:	100% EVA Ethylen vinyl acetát
Vnější potah vložky	36% PES, polyester
u Mars S, antibakteriální:	64% PUR polyurethan
Podšívka antibakteriální:	36% PES polyester 64% PUR polyurethan
Suché zipy:	100% PA polyamid

4 Aplikace

Poznámka: Před prvním vyzkoušením boty nasadíte na nohu pacienta přiložený plastový sáček (je součástí balení). Tím se zabrání kontaminaci obuvi bakteriemi v případě, že je potřeba vyměnit velikost.

Platí pro oba typy obuvi:

Na obuvi pro odlehčení paty rozepněte všechny suché zipy. Umístěte špičku nohy na polstrovanou vložku. Střední část nohy a přednoží se musí opírat o polstrovanou vložku. Zraněná pata je volná.

Pouze pro model Mars S:

Vyjměte z obuvi tlumící vložku. Nyní si můžete prohlédnout mediální klín a podle potřeby jej posunout na stávající straně nebo jej přesunout na druhou stranu postiženého chodidla. V případě potřeby lze upravit (viz Oblast použití). Poté vložku opět připevněte do obuvi pomocí suchých zipů.

Platí pro oba typy obuvi:

Obuv zavřete a dostatečně utáhněte všechny suché zipy tak, aby noha nemohla vyklouznout. Výměna suchých zipů je možná. Obuv pro odlehčení paty lze nosit na pravé i levé noze.

5 Technické údaje



Pro individuální přizpůsobení/léčbu dle indikace, lze upravovat podrážku obuvi broušením a lepením.

Výrobce nebo dodavatel ale, vzhledem k těmto technickým změnám produktu, nenese odpovědnost za případné škody nebo následné škody, resp. kontraindikace.

6 Údržba



- Před praním uzavřete všechny suché zipy
- Nesušte na topení

7 Použití

Obuv pro odlehčení paty 203R1 a 213R1 vyžaduje individuální nastavení na pacienta dle indikace. Veškeré nastavení musí být provedeno kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání obuvi pro odlehčení paty je určena ošetřujícím lékařem. Je závislá na účelu použití a použitých materiálech. Zohledněte prosím, že zdravotnický prostředek podléhá přirozenému opotřebení. Obratě se na svého lékaře nebo technika, pokud by používání již nebylo možné.

8 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedené výrobky jsou v souladu s požadavky nařízení (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích (MDR).

9 Garance

9.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tyto produkty, obuv pro odlehčení paty "Mars" 203R1 a "Mars S" 213R1, je garance 3 měsíce.

9.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení. Výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými technicky přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození. To samé platí i pro distributora produktu.

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz