

GO.adventure



Karbonové chodidlo

5A440/...

Návod k použití

Obsah

1	Obsah balení	2
2	Technická data	3
3	Popis a funkce	4
4	Stavba	4 – 6
4.1	Základní stavba	4
4.2	Nastavení při zátěži	5
4.3	Dynamické nastavení – technik	6
5	Technické údaje	6 – 7
5.1	Demontáž/montáž kosmetického krytu	6
5.2	Demontáž	6
5.3	Montáž	7
6	Umístění patního klínu	8 – 9
6.1	Montáž a demontáž patního klínu	9
7	Údržba a servis	9
8	Použití	10
8.1	Omezení použití	10
8.2	Nesprávné použití	10
8.3	Doba použití	10
9	Garance	11 – 12
9.1	Podmínky garance	11
9.2	Délka garance a její omezené trvání	11
9.3	Rozsah garance a vyloučení	12
9.4	Garanční servis	12
10	Prohlášení o shodě	13
11	Likvidace	13

1 Obsah balení

Balení obsahuje: 1x 5A440/... GO.adventure chodidlo

1x kosmetický kryt s těsnícím kosmetickým krytem

1x Spektra ponožku

1x sadu patních klínů (obsahuje: 2 patní klíny a lepidlo)

2 Technická data

Max. hmotnost pacienta:	viz tabulka
Stupeň aktivity (walky):	3 a 4
Připojení:	pyramidový adaptér
Stavební výška (závislá na velikosti chodidla):	144 mm (velikost 22 – 25) 155 mm (velikost 26 – 29)
Váha (včetně kosmetického krytu, těsnícího kosmetického krytu a Spektra ponožky):	cca 700 g (velikost 27)

	max. hmotnost pacienta:				
	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg	150 kg
velikost 22	✓	✓			
velikost 23	✓	✓	✓		
velikost 24	✓	✓	✓	✓	
velikost 25	✓	✓	✓	✓	
velikost 26	✓	✓	✓	✓	✓
velikost 27	✓	✓	✓	✓	✓
velikost 28		✓	✓	✓	✓
velikost 29			✓	✓	✓



Použití dle Streifeneder Walky-systému:

Chodidlo **5A440/... GO.adventure** je schváleno pro stupeň **aktivity 3 a 4** a pro maximální tělesnou hmotnost včetně běžně nošených a zvedaných břemen až do **150 kg** (v závislosti na velikosti chodidla, viz bod 2 - tabulka).


3 Popis a funkce

Chodidlo 5A440/... GO.adventure se používá výhradně k protetickému vybavení dolních končetin.


4 Stavba

4.1 Základní stavba

Zátěžová linie prochází chodidlem přibližně v $1/3$ od paty a ve $2/3$ od špičky chodidla.

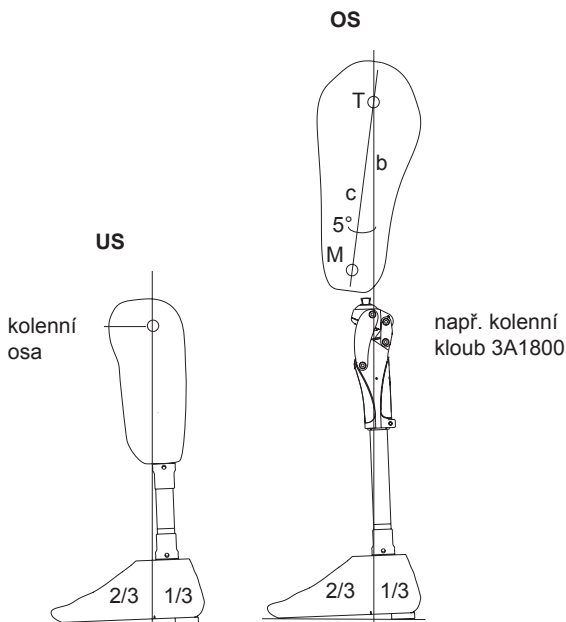


4.2 Nastavení při zátěži

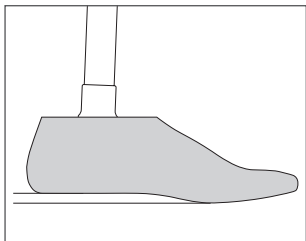


Nechte uživatele postavit s rovnoměrným rozložením hmotnosti na obě chodidla.

Výška podpatku: 0 až max. 10 mm

Dbejte na to, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení hmotnosti na přednoží a patu.

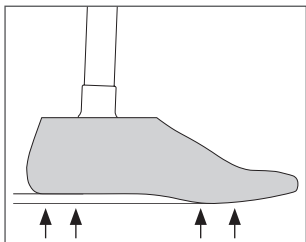

Zkontrolujte zátěžovou linii a zjistěte, zda je v souladu s doporučeným výchozím bodem.

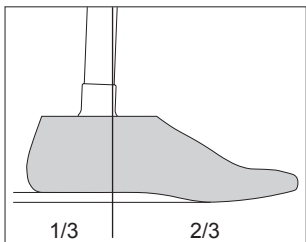

4.3 Dynamické nastavení – technik

Požadované hodnoty	Změny v nastavení	Výměna komponentů
tvrdší zpětná vazba prstů	nakloňte chodidlo směrem k plantární flexi nebo posuňte zátěžovou linii směrem dozadu	–
měkčí zpětná vazba prstů	nakloňte chodidlo ve směru dorsální extenze dozadu nebo posuňte zátěžovou linii směrem dopředu	–
tvrdší zpětná vazba paty	nakloňte chodidlo ve směru dorsální extenze dozadu nebo posuňte zátěžovou linii směrem dopředu	vložte patní klín (viz bod 6)
měkčí zpětná vazba paty	nakloňte chodidlo směrem k plantární flexi nebo posuňte zátěžovou linii směrem dozadu	odstraňte patní klín (viz bod 6)

5 Technické údaje

5.1 Demontáž/montáž kosmetického krytu

K nazouvání a vyzouvání kosmetiky chodidla použijte montážní lžíci 5M400, která usnadňuje nazutí a vyzutí kosmetického krytu z chodidla.

5.2 Demontáž/montáž kosmetického krytu



K nazouvání a vyzouvání kosmetiky chodidla použijte montážní lžíci 5M400, která usnadňuje nazutí a vyzutí kosmetického krytu z chodidla.

5.3 Demontáž



Při demontáži dbejte na to, aby pata přesahovala přes hranu stolu. To umožní vytažení kosmetiky chodidla a ulehčí se tím vyzutí.



Abyste si usnadnili nasazení kosmetiky chodidla, zaveďte po straně delší konec montážní lžice až pod patu a vpačte chodidlo do kosmetiky.



Pozor!

Spektra ponožka musí být před montáží kosmetiky vždy přetažena přes chodidlo.




Pozor!

Dbejte na to, aby se chodidlo nedostalo do styku s chemikáliemi podporujícími korozi a nevhodnými látkami jako jsou např. voda slaná nebo sladká, kyseliny, prach nebo písek! Při zanedbání tohoto předpisu nelze od f. Streifeneder ortho.production GmbH ani od dodavatele žádat náhradu.

Prosím, seznamte s touto podmínkou uživatele!


6 Umístění patního klínu

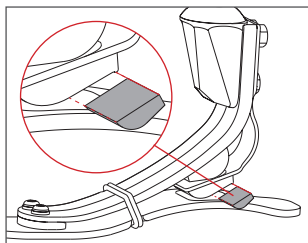

Možnosti nastavení patním klínem

Tuhost paty	Patní klín
měkká	žádný
střední	šedý
tvrdá	černý

6.1 Montáž a demontáž patního klínu

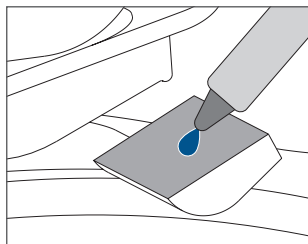


Montáž patního klínu

Pro dočasné zajištění pozice patního klínu naneste co nejmenší množství dodaného vteřinového lepidla. Pokud nanesete příliš velké množství lepidla, patní klín již nepůjde odstranit! Nastavte patní klín na doraz spodního tlumiče. Pevně zatlačte na patní klín po dobu cca 15 vteřin.

Demontáž patního klínu

Chcete-li patní klín demontovat bez poškození, vytlačte ho prstem nebo použijte plochý, tupý předmět (např. špacetli).

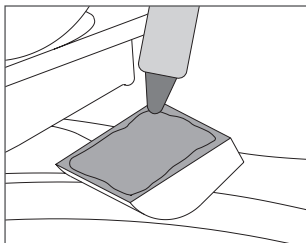

Trvalé slepení

Naneste tenkou linku vteřinového lepidla kolem obvodu patního klínu. Nastavte patní klín na doraz spodního tlumiče. Pevně zatlačte na patní klín po dobu cca 15 vteřin.



Pozor!

Po slepení již patní klín nelze odstranit.



Pozor!

Doporučené patní klíny nenahrazujte jinými předměty.

7 Údržba a servis

Protézové chodidlo je bezúdržbové.

Poznámka:

Obecně platí, že všechny pohyblivé části musí být kontrolovány vizuálně a na funkčnost každých 6 měsíců; všechny pevné konstrukční části každých 12 měsíců. Bude-li produkt používán pro lehké sportovní aktivity, musí být intervaly kontrol zkráceny na maximálně 3 měsíce.



Poznámka:

Pokud je to nutné, vyměňte kosmetický kryt a/nebo Spektra ponožku.

8 Použití

Tento produkt vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení uživateli dle indikace. Veškeré mechanické nastavení musí být provedeno odborným a vyškoleným personálem.

8.1 Omezení použití

Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, smí být produkt používán pouze jedním uživatelem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí být používán další osobu.



Pozor!

Upozorňujeme na to, že tento produkt byl testován a schválen pouze ve spojení s modulárními díly f. Streifeneder ortho.production GmbH.

8.2 Nesprávné použití

Tento produkt je určen výhradně pro pohybovou aktivitu (walky) 3 a 4 a pro maximální tělesnou hmotnost včetně běžně nošených a zvedaných břemen (viz bod 2). Produkt nesmí být vystaven nadměrnému přetížení (nárazům, úderům a vibracím).



Pozor!

Maximální zatížení chodidla je omezeno a závisí na použitém dílu s nejnižším hmotnostním limitem. Tento díl určuje maximální hmotnostní zatížení celé protézy. Maximálním hmotnostním zatížením je tělesná hmotnost uživatele včetně běžně nošených a zvedaných břemen (viz bod 2).

8.3 Doba použití

Doba použití produktu je omezena na 3 roky.

9 Garance

Následující garance je platná v souladu s jinými relevantními zákony danými garančními nároky a je od těchto nezávislá. Garance je poskytována namísto jakýchkoli jiných vyjádřených nebo nepřímo vyjádřených garancí nebo vhodných garancí pro konkrétní účel.

9.1 Podmínky garance

Nároky vyplývající z garance výrobce lze uplatňovat pouze v případě, že daný produkt byl namontován a seřízen certifikovaným/akreditovaným ortopedickým technikem a v případě, že byl produkt řádně a pravidelně udržován vyškoleným technikem ve stanovených intervalech. Pokud jde o údržbu a předepsané termíny, jsou dány f. Streifeneder ortho.production GmbH. Prováděný servis a údržba musí být potvrzeny datem, razítkem a stvrzeny podpisem provádějící odborné firmy. Odpovídající ověření musí být f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo dodavateli předloženo bez žádosti při uplatnění nároků vyplývajících z této garance.

9.2 Délka garance a její omezené trvání

Délka garance od výrobce se liší v závislosti na typu produktu. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Konkrétní podmínky garance pro tento produkt jsou následující:

Délka garance: 5A440/... GO.adventure = 36 měsíců

Délka garance: 5A400/X... Kosmetický kryt = 6 měsíců

Nároky vyplývající z této garance musí být neprodleně písemně uplatněny u f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo u dodavatele, a to nejpozději do 1 měsíce od zjištění nároku dle této garance. Právo uplatňovat nároky na garanci po uplynutí této lhůty je výslovně vyloučeno.

9.3 Rozsah garance a vyloučení

Je zaručeno, že produkt je bez materiálových a výrobních vad.

Garance se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- chybné stavby protézy,
- nedbalé nebo nesprávné montáže,
- nevhodného použití (zejména v rozporu s danými pokyny výrobce),
- běžného a nadměrného opotřebení,
- vnějších vlivů (např. vyšší moc nebo zásahy ze stran třetích osob).

Stejně tak nejsou zahrnuty optické vady bez vlivu na funkčnost daného produktu, rovněž vady vyplývající z kombinace poškozených dílů, použitím dílů neschválených f. Streifeneder ortho.production GmbH a/nebo zásahy či opravy prováděné neautorizovaným prodejcem f. Streifeneder ortho.production GmbH.

Garance nevytváří závazky vůči f. Streifeneder ortho.production GmbH a dodavateli, pokud se jedná o náhradu následné škody nebo poškození jakéhokoli druhu či jiných nároků na náhradu škody. Výjimkou jsou závazné právní předpisy, dle kterých f. Streifeneder ortho.production GmbH nad rámec dobrovolné garance za produkt ručí.

9.4 Garanční servis

Jsou-li splněny všechny podmínky této garance, f. Streifeneder ortho.production GmbH na základě vlastního uvážení buď produkt opraví nebo vymění zdarma.

10 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že chodidlo 5A440/... GO.adventure je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EHS.

11 Likvidace

Produkt je pro člověka a životní prostředí nezávadný a lze jej recyklovat. Musí být zlikvidován nebo zrecyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Návod k použití je chráněn autorským zákonem. Kopírování kompletního návodu k použití nebo i částí v jakékoliv formě je povoleno pouze s výslovným písemným povolením f. Streifeneder ortho.production GmbH. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou informativní a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení možných mírných odchylek v konstrukci, tvaru, barvě nebo v obsahu balení. Produkty mohou být změněny bez předchozího upozornění po tisku tohoto návodu k použití v 2019-08. Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoliv k nahlédnutí na www.streifeneder.com/op.

**Autorizovaný zástupce a
prodejce na Slovensku:**

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Germany
T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de/op

Prodejce v ČR:

ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz