

Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

10A6/A

<85 Kg / 187 liber

Lůžkový adaptér – aluminium

CE

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1

Obr. 1


Seřizovací šrouby vymontujte z lůžkového adaptéru.



Obr. 2

Obr. 2

Naolejovanou ochrannou krytkou 22A10 proximálně stlačte, až distálně zapadne.

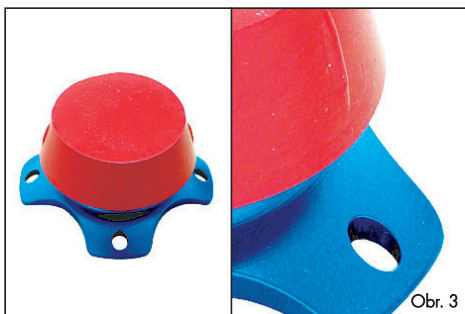

Obr. 3

Obr. 3

Distálně nastavte namazanou laminační krytku 22A10 tak, aby označení ze stran bylo nad děrami šroubů a zároveň ukazovalo polohu pyramidy, a zatlačte ji.

Technické informace

Hmotnost	53 g
Kompatibilitní:	pro laminování bérce
Zatížitelnost:	85 kg
Dotahovací moment:	M8 ≙ 15 Nm
Inspekce:	12 měsíců

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG zaručuje rozšířenou garanci po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že bérceový adaptér - aluminium - 10A6/A odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.