

Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

10A43/T60

< 100 Kg / 220 liber

Dvojitý posuvný adaptér – titan


F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de




Obr. 1



Obr. 2

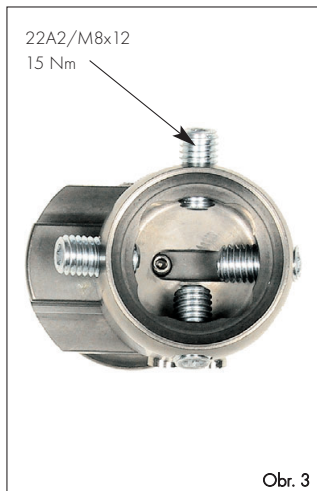

Obr. 3

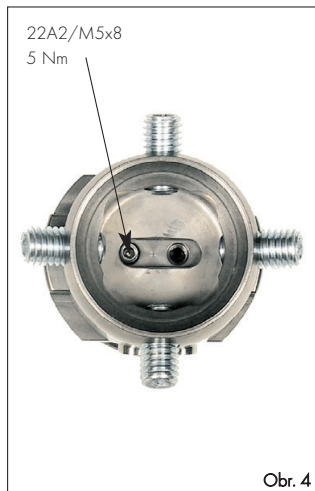

Obr. 4

1. Účel použití

Posuvný adaptér 10A43/T60 je určen výhradně k protetikému ošetření dolních končetin. Podle klasifikačního systému firmy Streifeneder je určen pacientům s tělesnou hmotností do 100 kg.

2. Popis

Posuvný adaptér 10A43/T60 představuje spojení mezi dvěma pyramidami a modulární stehenní nebo bérčovou protézou firmy Streifeneder. Vedle funkce jako dvojitý adaptér (jako 10A50) jsou možné další translační nastavení lůžka protézy (Obr.1 a 2).

3. Manipulace se stavěcími šrouby

Pomocí čtyř stavěcích šroubů 22A2/M8x12 je možné kdykoliv provést statické korektury během montáže a zkoušení protézy, i po jejím dokončení. Při výměně modulu nebo při demontáži se původně nastavená pozice ponechává, pokud se vymontují jen dva vedle sebe umístěné stavěcí šrouby, a to ty, které jsou zašroubovány nejhluběji (obr. 3).

Pro utažení stavěcích šroubů použijte momentový klíč 173P11, dotahovací moment: 15 Nm.

4. Nastavení posuvu

Translační nastavení je možné provést alternativně ve frontální nebo v sagitální rovině. Horní část adaptéru je možné posunout přes stabilní rybinové vedení o 11 mm a zajistit napínacím šroubem 22A3/M6x8 (obr. 2).

Použijte momentový klíč 173P11, dotahovací moment 15 Nm.

Posunutí omezuje dorazový šroub 22A2/M5x8 (obr. 4). Pro nastavení do opačného směru posouvání je třeba ho přemístit.

Použijte momentový klíč 173P10, dotahovací moment 5 Nm.

Bez dorazového šroubu 22A2/M5x8 se posuvný adaptér nesmí používat!

Při dokončení protézy zajistěte stavěcí šrouby pomocí Loctite 118P35.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG zaručuje rozšířenou garanci po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný adaptér 10A43/T60 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.