



Streifeneder

**Orthopädische
Produktion & Vertrieb**

30S1/D56 30S1/D66 30S1/D76

Laminační dummy pro sérii
zámků 300

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1

Obsah dodávky (viz obrázek 1)

1. Laminační dummy	30S1/D..
2. Úchytka	10S1/E61
3. Šroub úchytky	22A5/M8x50
4. Náhradní těsnící kroužek	30S1/D10
5. Návod k použití	30S1/DGD



1. Laminační dummy pro sérii zámků 300

Díky používání laminačního dummy při zhotovování zkušebních či definitivních lůžek jsou zámkové série 300 kompletně výměnitelné. Dále je možno kombinovat s různými laminačními diskami nebo kotvami.

Je možno obdržet opětovně použitelné laminační dummy ve třech průměrech pro pokrytí všech velikostí silikonových nápleků.

- ze znovu použitelného plastu
- s těsnícím kroužkem
- kompletní s úchytkou
- a náhradním těsnícím kroužkem


Dummy	pro velikost silik. lůžka	pro zámek	Číslo objednávky
průměr 56 mm	od 23,5 - 45	302; 303	30S1/D56
průměr 66 mm	od 26,5 - 45	301; 302; 303	30S1/D66
průměr 76 mm	od 30 - 45	301; 302; 303	30S1/D76

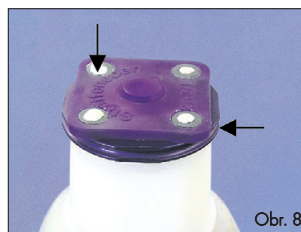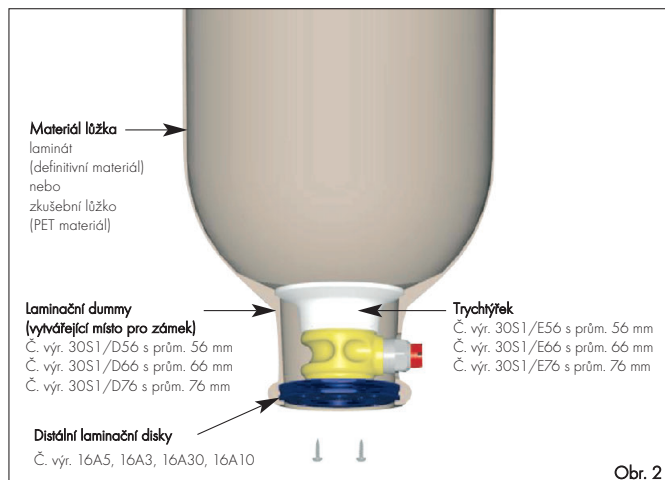

Vnitřní šestihran zapuštěných šroubů vyplňte plastelinou 113P7.



Přetáhněte změkčenou PVA-fólii 119P3 a distálně v místě odstupu dummy utěsněte několiknásobným ovázáním

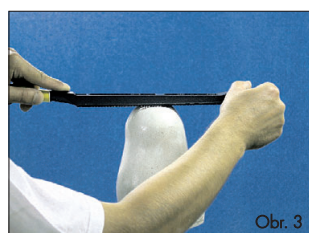


2. Návod k montáži

Zmenšení distálního konce pažuly na sádrovém pozitivu na plochu 47 mm.

Pozor

Úhel napilované plochy udává směr pro trn.

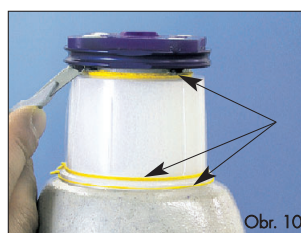

Přebytečnou PVA-fólii pod laminačním diskem odsáhněte. Pro další utěsnění je možné připevnit PVA-fólii pomocí lepicí pásky uprostřed na laminačním dummy.



Kužel laminačního krytu se fixuje přiloženými hřebíky (teksy).
Obrys laminačního dummy musí kolem dokola přiléhat k sádrovému pozitivu.



Odstříhnete hadici z Polyglas-Trikotu 95P17 o dvojnásobné délce a do poloviny ji přetáhněte. Před otočením zpět ji v laminačním disku obeptejte dokola páskou z uhlíku 95P18 a převažte karbonovou nití 250P14. Kryt navíc několikrát omotejte.

Pro další armování doporučujeme:

- 1 rámeček z karbonové pásky 95P8
- 1 1/3 hadice z uhlíkových a skelných vláken 95P30 navlékněte v oblasti laminačního dummy
- 2x hadice z Polyglas Trikotu 95P17
- pletenou hadici ze skelných vláken 95P23 o 1,5 násobné délce
- 2 hadice z Polyglas Trikotu 95P17



Sádrový pozitiv se izoluje a následně uchytí do vakuové trubky.



Nasaďte laminační dummy a připevněte laminační disk šroubem úchytky.
Předtím lehce namažte přiléhající plošky a O-kroužek!

Pozor


Šroub úchytky se přitáhne tak, aby laminační disk i dummy zcela přiléhaly. O-kroužek se přitom stlačí.




Lehce namažte příkladací plochy laminovacího krytu 22A13 a vložte jej do laminovacího disku. Zatlačení palcem ve střední části umožní uniknout vzduch. Čtyřmi namazanými zapuštěnými šrouby utáhněte tak, aby bylo přiložení těsné.




Poté přetáhněte armování změkčenou PVA-fólií 119P3 a začneme s laminováním. Jako akrylovou pryskyřici doporučujeme naši laminovací pryskyřici 80:20 112P20 nebo při vysokém podílu uhlíkových vláken C-laminovací pryskyřici 112P22, jakož i barvicí pastu 112P36.

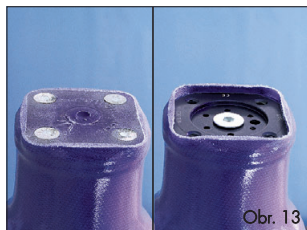

Obr. 13

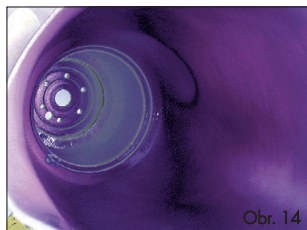

Obr. 14

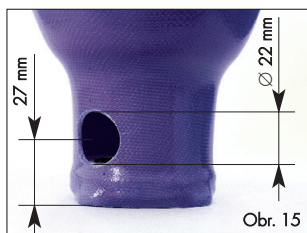


Obr. 15



Obr. 16



Obr. 17

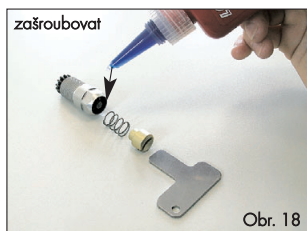

Obr. 18

Odkryjte plošným obroušením laminační kryt a vyjměte jej. Okraj kolem laminační krytky se nesmí plošně obroušovat. Poskytuje laminovacímu disku potřebné uchycení a zvyšuje stabilitu.

Šroub úchytky vyjměte z laminačního disku a opatrně oddělte od sádrového pozitivu stlačeným vzduchem.

Podle použitého zámku přeneste otvor pro blokovací jednotku na lůžko. K vrtání použijte frézu pro blokovací jednotku 22 mm Ø, objednávací č. výrobku 150P2/22.

Pomocí šestihranného klíče 173P15/16 vyšroubujte blokovací jednotku z zámku.

⚠ Levotočivý závit
u Clutch-Locku 301

⚠ Pravotočivý závit
u Shuttle Locku 302 a Easy Locku 303

Přiložte trychýřek na zámek, aby zapadnul. Zevnitř vsadte zámek s nasazeným trychýřkem a distálně upevněte přiloženými šesti šrouby 22A4/2995. V konečném provedení lze lůžko distálně smontovat s různými adaptéry.

Tlačítko či nástavec tlačítka odmastíme a našroubujeme s Loctite 118P35.

⚠ Pozor
Ručně s použitím šestihranného klíče 173P15/16 pevně našroubujte blokovací jednotku.

3. Laminační dummy - přehled

Laminační dummy			
Číslo výrobku	30S1/D56	30S1/D66	30S1/D76
Průměr	56 mm	66 mm	76 mm
vhodný	-	Clutch-Lock 301	Clutch-Lock 301
pro	Shuttle-Lock 302	Shuttle-Lock 302	Shuttle-Lock 302
zámky	Easy-Lock 303	Easy-Lock 303	Easy-Lock 303
k tomu náležející trychýřek, č. výrobku	30S1/E56	30S1/E66	30S1/E76
od velikosti silik. lůžka	23,5 - 45	26,5 - 45	30 - 45
kompatibilní se	-	-	Endolite systémem

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že laminační dummy 30S1/D56, 30S1/D66 a 30S1/D76 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.