



CE

Obuv pro odlehčení přednoží

200R1 Model „Venus“

201R1 Model „Merkur“

205R1 Model „Jupiter“

Obsah

1	Všeobecná doporučení	3
2	Oblast použití	4
2.1	Indikace	4
2.2	Kontraindikace.....	4
3	Technická data	5 – 7
3.1	Velikostní tabulka	5
3.2	Příslušenství.....	6 – 7
3.3	Materiály.....	7
4	Aplikace.....	7
5	Technické údaje.....	8
6	Údržba.....	8
7	Použití	8
7.1	Omezení použití	8
7.2	Doba používání	8
8	Garance.....	9
8.1	Délka garance	9
8.2	Rozsah garance	9
9	Prohlášení o shodě	10
10	Likvidace	10

1 Všeobecná doporučení



Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a berte na vědomí zejména bezpečnostní pokyny.

Obrázky jednotlivých typů



Obj. číslo 200R1 “Venus“
krátké provedení, bezpečnostní
kryt přednoží objednejte
samostatně



Obj. číslo 201R1 “Merkur“ s
dlouhou polstrovanou vložkou



Obj. číslo 205R1 “Jupiter“ s
dlouhou polstrovanou vložkou a
dodatečným suchým zipem na
přednoží

2 Oblast použití

Hlavním rysem obuvi pro odlehčení přednoží je mírně zvednutá podrážka v oblasti přednoží (záporný podpatek). To zajišťuje rozložení a zmírnění tlaku při chůzi, čímž se zlepšuje hojení v oblasti přednoží.

Obuv pro odlehčení přednoží obepíná patu a oblast hlezna měkce polstrovaným svrškem a opátkem. Pásky suchého zipu drží nohu v určeném místě a brání sklouzávání nohy z boty.

2.1 Indikace

Rány / Poranění v oblasti přednoží způsobená:

- Diabetes mellitus
- Uzávěry periferních artérií
- Další rány bez rozlišení indikace, po operaci nebo traumatu



Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními v oblasti přednoží jsou otlaky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat nohy, bandáže nebo ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů či otázek, zpomalení či přerušení hojení rány ("komplikace"), kontaktujte prosím svého lékaře nebo vyškolený personál v prodejně zp.

2.2 Kontraindikace

- Nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy od tlaku
- Nenoste přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku (před aplikací chraňte pokožku ponožkou a poranění obvazem)
- Nepoužívejte při nestabilních zlomeninách či výskytu diabetické neuro-osteopatie (tj. Charcotova noha)

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

„Venus“

Velikost boty	Vnitřní délka boty	Obj. číslo
36 – 38	cca. 160 mm	200R1/S
39 – 42	cca. 175 mm	200R1/M
43 – 46	cca. 190 mm	200R1/L
47 – 51	cca. 205 mm	200R1/XL

„Merkur“

Velikost boty	Vnitřní délka boty	Vnitřní šířka obuvi	Obj. číslo
31 – 33	cca. 220 mm	cca. 87 mm	201R1/XS
34 – 36	cca. 240 mm	cca. 91,5 mm	201R1/S
37 – 39	cca. 260 mm	cca. 96 mm	201R1/M
40 – 42	cca. 280 mm	cca. 100,5 mm	201R1/L
43 – 45	cca. 300 mm	cca. 105 mm	201R1/XL
46 – 48	cca. 320 mm	cca. 109,5 mm	201R1/XXL

„Jupiter“

Velikost boty	Vnitřní délka boty	Vnitřní šířka obuvi	Obj. číslo
31 – 33	cca. 220 mm	cca. 87 mm	205R1/XS
34 – 36	cca. 240 mm	cca. 91,5 mm	205R1/S
37 – 39	cca. 260 mm	cca. 96 mm	205R1/M
40 – 42	cca. 280 mm	cca. 100,5 mm	205R1/L
43 – 45	cca. 300 mm	cca. 105 mm	205R1/XL
46 – 48	cca. 320 mm	cca. 109,5 mm	205R1/XXL

Všechny typy je možné nosit na levé i pravé noze.

3.2 Příslušenství

“Venus“

Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost boty
200R10/S	36 – 38
200R10/M	39 – 42
200R10/L	43 – 46
200R10/XL	47 – 51

“Merkur“

Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost boty
201R1/XS	31 – 33
201R1/S	34 – 36
201R1/M	37 – 39
201R1/L	40 – 42
201R1/XL	43 – 45
201R1/XXL	46 – 48

Nastavitelný ochranný kryt

Obj. číslo	Velikost boty
200R14/S	36 – 38
200R14/M	39 – 42
200R14/L	43 – 46
200R14/XL	47 – 51

“Jupiter“

Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně

Obj. číslo	Velikost boty
205R10/XS	31 – 33
205R10/S	34 – 36
205R10/M	37 – 39
205R10/L	40 – 42
205R10/XL	43 – 45
205R10/XXL	46 – 48

Materiál pro individuální úpravu (černý)

Obj. číslo	Popis
-------------------	--------------

20T3/S	Distanční elastická textilie, 140 cm
26T7/S	Oboustranný suchý zip, 135 cm
51T1/14S	Bavlněný lemovaný popruh, 14 mm
60T18F25S	Suchý zip flauš, 25 mm
60T18K25S	Suchý zip háček, 25 mm

3.3 Materiály

Obuv pro odlehčení přednoží je vyrobena z následujících materiálů:

Podrážka:	PU-tvarovaná	100%	PU	Polyurethan
	podrážka			
Vložka:	pěna:	100%	EVA	Ethylen vinyl acetát
	potah:	100%	PES	Polyester
Vrchní materiál a podšívka:		100%	PES	Polyester
Suchý zip:		100%	PA	Polyamid

4 Aplikace

Na obuvi pro odlehčení přednoží rozepněte všechny suché zipy a umístěte poraněnou nohu do boty na vložku patou na doraz k opatku. Poté zavřete botu a utáhněte všechny suché zipy tak, aby noha nemohla vyklouznout. Obuv pro odlehčení přednoží je možné nosit na levé i pravé noze.

5 Technické údaje



Typ "Venus" s bezpečnostním krytem na ochranu přednoží před nárazy a následným zraněním. Bezpečnostní kryt lze nastavit na délku nohy. Pro individuální léčbu lze upravovat podrážku boty broušením a lepením. Avšak výrobce nebo dodavatel vzhledem k těmto změnám nenese odpovědnost za případné nebo následné škody, resp. kontraindikace.

6 Údržba



- Před praním uzavřete všechny suché zipy
- Nesušte na topení

7 Použití

Obuv pro odlehčení přednoží vyžaduje individuální nastavení na pacienta dle indikace. Veškeré nastavení musí být provedeno kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání obuvi pro odlehčení přednoží je určena ošetřujícím lékařem.

8 Garance

8.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tyto produkty, obuv pro odlehčení přednoží 200R1, 201R1 a 205R1 je garance 3 měsíce.

8.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení. Výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými techniky, přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození. To samé platí i pro distributora produktu.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedené výrobky obuvi pro odlehčení přednoží 200R1, 201R1 a 205R1 jsou v souladu s požadavky směrnice 93/42/EWG.

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz