



Streifeneder

**Orthopädische
Produktion & Vertrieb**

10A41/T


< 100 Kg / 220 liber

Posuvný adaptér s laminační kotvou – titan


F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1

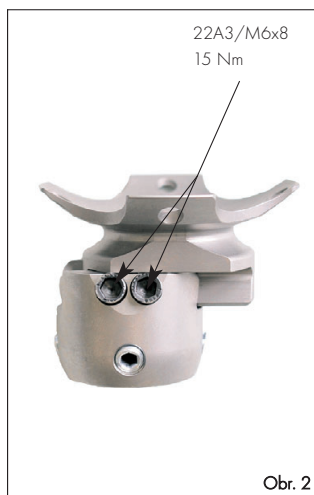

Obr. 2

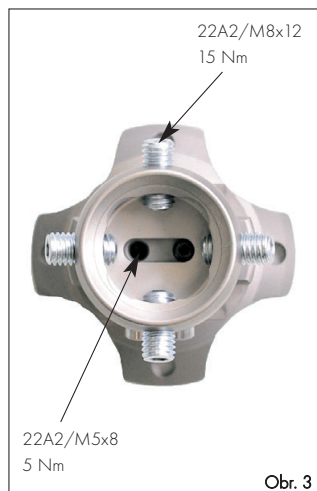

Obr. 3



Obr. 4

1. Účel použití

Posuvný adaptér 10A41/T se užívá výhradně k protetikému ošetření dolních končetin. Podle klasifikačního systému firmy Streifeneder je doporučován pro pacienty s tělesnou hmotností do 100 kg.

2. Popis

Posuvný adaptér 10A41/T zajišťuje spojení mezi pyramidou a lůžkem protézy. Vedle této funkce je možno navíc provádět translační nastavování lůžka protézy (Obr. 1 a 2).

3. Manipulace se stavěcími šrouby

Pomocí čtyř stavěcích šroubů 22A2/M8x12 je možno přehledně provádět statické korektury kdykoli během konstrukce, při zkoušce, ale i po dokončení protézy. Při výměně jednoho modulu nebo při demontáži je původně nastavená pozice ponechána, jsou-li vyšroubovány pouze dva vedle sebe se nacházející šrouby, a sice ty původně nejvíce zašroubované (Obr. 3).

Pro utáhnutí šroubů použijte momentový klíč, dotahovací moment 15 Nm.

4. Nastavení posuvu

Translační nastavení je možno alternativně provádět ve frontální a sagitální rovině. Horní část adaptéru lze po rybinovém vedení posunout asi o 11 mm, a pak fixovat šrouby 22A3/M6x8 (Obr.2).

Použijte momentový klíč 173P11, dotahovací moment 15 Nm.

Posuvná dráha je omezena dorazovým šroubem 22A2/M5x8 (obr. 4).

Pro nastavení v opačném směru posuvu je nutno ho přemístit.

Použijte momentový klíč 173P10, dotahovací moment 5 Nm.

Bez dorazového šroubu 22A2/M5x8 je užívání posuvného adaptéru nepřípustné!

Při dokončování protézy zajištěte šrouby pomocí Loctite 118P35.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, jestli výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný adaptér 10A41/T odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.