


Strukturteile


Stanovení systémové výšky modulárních dílů Streifeneder

Aby se zjistila skutečná výška protézy, vyvinula firma Streifeneder ortho.production pro ortopedické techniky jednoduchý systém určování stavební výšky. Na následujících stránkách naleznete ke každému stavebnímu dílu odpovídající stavební výšku. Pro zjednodušení systému je většina stavebních dílů označena identicky s viditelnou stavební výškou.


Upne-li se pyramidová část adaptéru do druhého adaptéru, je stavební výškou výška do poloviny viditelného středu jeho zaoblené dosedací plochy.

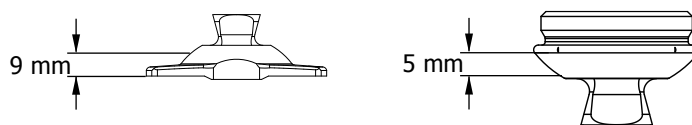


U dílů se čtyřšroubovým uchycením je stavební výškou celá výška, protože díl je po zabudování celý vidět.

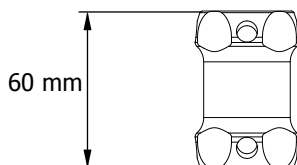


Trubka se vždy započítává celou svou délkou do stavební výšky.

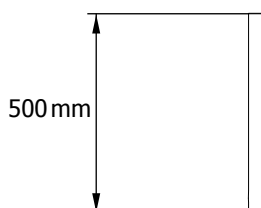

U šroubového adaptéru je stavební výškou celková výška adaptéru minus zápustná hloubka trubky.

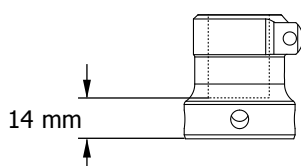

Součet jednotlivých stavebních výšek dává skutečnou výšku protézy (viz příklad uvedený na protější straně)

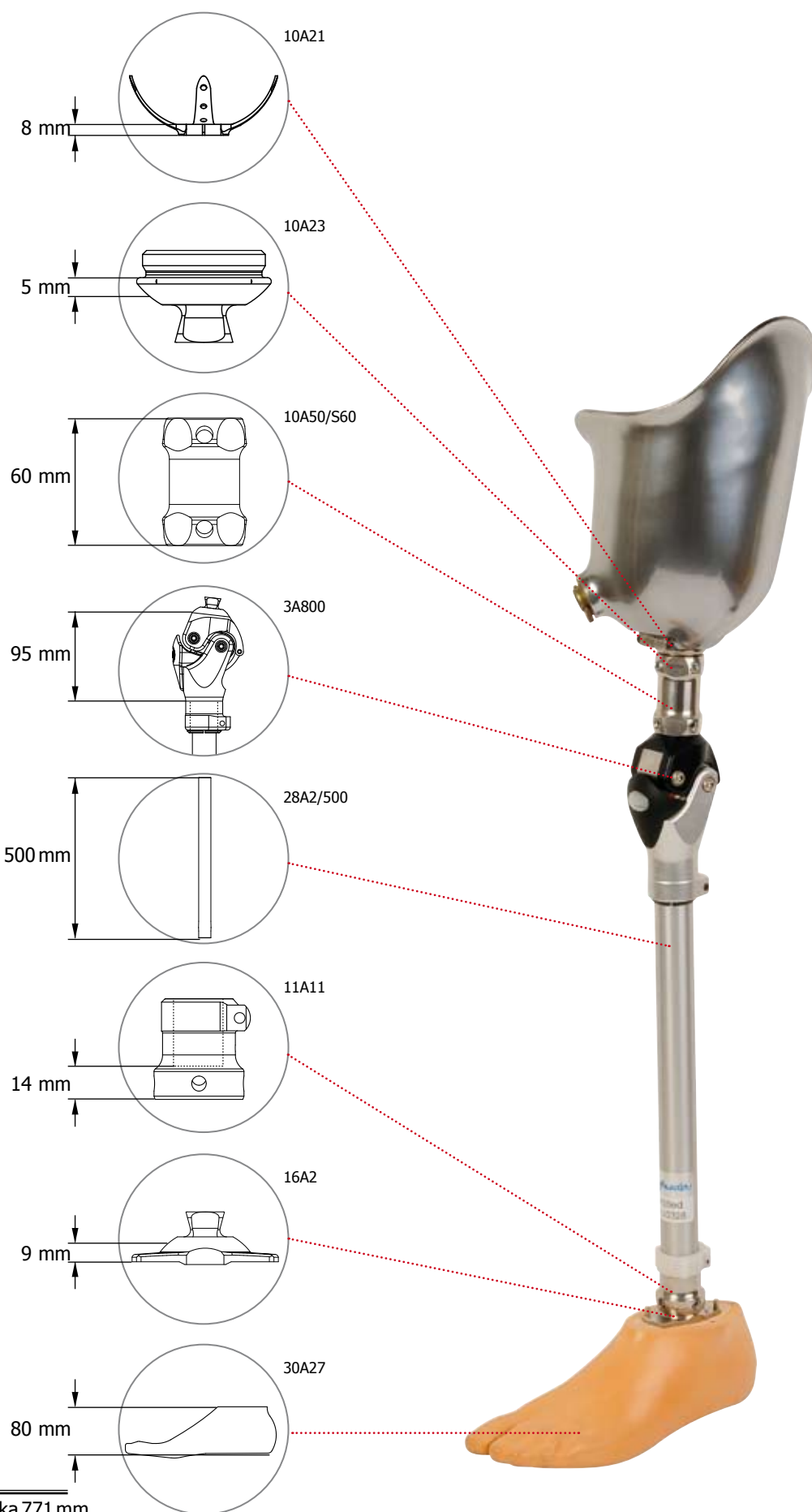

Celková výška 771 mm