

## Obuv pro odlehčení části nohy



217R1/... Model „Komet“

Návod k použití

# Obsah

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>1 Všeobecná doporučení.....</b>            | <b>3</b>     |
| <b>2 Oblast použití.....</b>                  | <b>3 – 4</b> |
| 2.1 Indikace.....                             | 4            |
| 2.2 Kontraindikace.....                       | 4            |
| <b>3 Technická data.....</b>                  | <b>5 – 6</b> |
| 3.1 Velikostní tabulka.....                   | 5            |
| 3.2 Příslušenství.....                        | 5            |
| 3.3 Materiál .....                            | 6            |
| <b>4 Aplikace.....</b>                        | <b>6</b>     |
| <b>5 Technické údaje.....</b>                 | <b>6</b>     |
| <b>6 Údržba .....</b>                         | <b>6</b>     |
| <b>7 Použití.....</b>                         | <b>7</b>     |
| 7.1 Omezení použití .....                     | 7            |
| 7.2 Doba používání .....                      | 7            |
| <b>8 Garance .....</b>                        | <b>8 – 9</b> |
| 8.1 Podmínky garance .....                    | 8            |
| 8.2 Délka garance a její omezené trvání ..... | 8            |
| 8.3 Rozsah garance a vyloučení.....           | 9            |
| 8.4 Garanční servis.....                      | 9            |
| <b>9 Prohlášení o shodě .....</b>             | <b>10</b>    |
| <b>10 Likvidace .....</b>                     | <b>10</b>    |



Další informace a rady naleznete na stránkách  
[www.streifeneder.de/op/dfs](http://www.streifeneder.de/op/dfs).

# 1 Všeobecná doporučení

217R1/...

Vážený zákazník/uživatel,

Váš lékař Vám předepsal vysoce kvalitní zdravotní pomůcku – obuv pro odlehčení části nohy "Komet". Pomůcka byla vyrobena v souladu s nejnovějšími znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje.



**Postupujte, prosím, podle tohoto návodu k použití. To Vám zajistí úspěch Vaší léčby. Protetický technik, prodejce zdravotnických potřeb nebo ošetřující lékař Vám rád zodpoví dotazy týkající se používání obuvi pro odlehčení části nohy "Komet".**

## 2 Oblast použití

- rozložení tlaku a odlehčení přednoží díky rigidní (= pevné) podrážce, podporuje v odvalu chodidla, hojení ran v přednoží
- vyjímatelná polstrovaná vložka zmírňuje tlak po celé délce chodidla
- zpevněná oblast paty a pásky v přednoží poskytují oporu nohy
- nastavitelné pásky suchého zipu pro přizpůsobení šířce nohy
- široký, hranatý tvar podešve v oblasti přednoží pro pooperační péči za použití Kirschnerových drátů
- vysoká odolnost proti skluzu díky profilované podrážce
- polstrovaná vložka je vybavena antibakteriálně na bázi amonium-silanové sloučeniny. To snižuje osídlení materiálu určitými bakteriálními kmeny (např. *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*).

## 2.1 Indikace

- rány v oblasti přednoží vzniklé diabetes mellitus
- onemocnění periferních arterií
- jiné na indikaci nezávislé vznikající rány v přednoží
- pooperační, při korekturách a poraněních přednoží



**Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními v oblasti nohy a hlezna jsou otlaky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat chodidla, obvazy nebo ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů nebo otázek, zpomalení hojení rány nebo z důvodu pacientova rozhodnutí o přerušení terapie (“komplikace“) kontaktujte, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo vyškolený personál, který Vám pomůcku předal.**

## 2.2 Kontraindikace

- nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy a odlehčení tlaku
- nenoste obuv přímo na poraněné, podrážděné nebo poškozené pokožce (před použitím chraňte pokožku obvazem a ponožkou)
- nepoužívejte při nestabilních frakturou ohrožených diabetických osteoartropatických syndromech nohy (např. Charcotova noha)

## 3 Technická data

### 3.1 Velikostní tabulka

#### Měření velikosti obuvi

| Velikost obuvi | Vnitřní délka obuvi | Vnitřní šířka obuvi | Obj. č.  |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|
| 35 – 36        | cca 242 mm          | cca 103 mm          | 217R1/36 |
| 37 – 38        | cca 255 mm          | cca 106 mm          | 217R1/38 |
| 39 – 40        | cca 268 mm          | cca 109 mm          | 217R1/40 |
| 41 – 42        | cca 282 mm          | cca 112 mm          | 217R1/42 |
| 43 – 44        | cca 295 mm          | cca 115 mm          | 217R1/44 |
| 45 – 46        | cca 308 mm          | cca 118 mm          | 217R1/46 |
| 47 – 48        | cca 322 mm          | cca 121 mm          | 217R1/48 |
| 49 – 50        | cca 335 mm          | cca 124 mm          | 217R1/50 |

Obuv pro odlehčení části nohy “Komet” je možné nosit na levé i pravé noze.

#### 3.2 Příslušenství

| Polstrovaná symetrická 10mm vložka vyrobená z materiálu EVA s velurovým potahem |           | Ochranný kryt přednoží s vnější flaušovou stranou |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| Velikost obuvi                                                                  | Obj. č.   | Velikost obuvi                                    | Obj. č.   |
| 35 – 36                                                                         | 217R11/36 | 35 – 36                                           | 217R12/36 |
| 37 – 38                                                                         | 217R11/38 | 37 – 38                                           | 217R12/38 |
| 39 – 40                                                                         | 217R11/40 | 39 – 40                                           | 217R12/40 |
| 41 – 42                                                                         | 217R11/42 | 41 – 42                                           | 217R12/42 |
| 43 – 44                                                                         | 217R11/44 | 43 – 44                                           | 217R12/44 |
| 45 – 46                                                                         | 217R11/46 | 45 – 46                                           | 217R12/46 |
| 47 – 48                                                                         | 217R11/48 | 47 – 48                                           | 217R12/48 |
| 49 – 50                                                                         | 217R11/50 | 49 – 50                                           | 217R12/50 |

### 3.3 Materiál

Obuv pro odlehčení části nohy je vyrobena z následujících materiálů:

|                     |                           |       |     |                      |
|---------------------|---------------------------|-------|-----|----------------------|
| Podrážka:           | PU-tvarovaná<br>podrážka: | 100 % | PU  | polyurethan          |
| Polstrovaná vložka: | pěna:                     | 100 % | EVA | ethylen vinyl acetát |
|                     | potah:                    | 100 % | PES | polyester            |
| Podšívka:           |                           | 100 % | PES | polyester            |
| Suché zipy:         |                           | 100 % | PA  | polyamid             |

## 4 Aplikace

Rozepněte všechny suché zipy na obuvi pro odlehčení části nohy a umístěte poraněnou nohu do boty na vložku patou na doraz k opatku. Poté zapněte botu utažením všech suchých zipů tak, aby noha nemohla vyklouznout.



**Poznámka:** Před prvním vyzkoušením boty nasadte na nohu pacienta plastový sáček (je součástí balení). Tím se zabrání kontaminaci boty bakteriemi v případě, že je třeba změnit velikost.

## 5 Technické údaje



**Pro individuální přizpůsobení pacientovi dle indikace lze podrážku boty upravovat broušením a lepením.**

**Avšak výrobce nebo dodavatel vzhledem k těmto změnám nenese odpovědnost za případné škody nebo následné škody, resp. kontraindikace.**

Model obuvi "Komet" je možné nosit na levé i pravé noze!

TLoušťka polstrované vnitřní vložky je cca 10 mm a efektivní výška podpatku cca 10 mm pro všechny velikosti!

## 6 Údržba



- před praním uzavřete všechny suché zipy
- nesušte na přímém zdroji tepla

## **7 Použití**

Obuv pro odlehčení části nohy "Komet" vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení dle indikace lékaře. Veškeré změny musí být provedeny odborným a vyškoleným personálem.

### **7.1 Omezení použití**

Vzhledem k přizpůsobení a z hygienických důvodů, smí být výrobek používán pouze jedním uživatelem. Nesmí být používán další osobou.

### **7.2 Doba používání**

Doba používání je určena ošetřujícím lékařem.

## 8 Garance

Následující garance je platná v souladu s jinými relevantními zákony danými garančními nároky a je od těchto nezávislá. Garance je poskytována namísto jakýchkoli jiných vyjádřených nebo nepřímě vyjádřených garancí nebo vhodných garancí pro konkrétní účel.

### 8.1 Podmínky garance

Nároky vyplývající z garance výrobce lze uplatňovat pouze v případě, že byl výrobek použit podle tohoto návodu k použití a dle doporučení personálu, který Vám výrobek předal. Pokud Vám byl výrobek přizpůsoben akreditovaným ortopedickým technikem, byl řádně a pravidelně udržován ve stanovených intervalech, záleží v případě uplatnění garance na rozsahu provedené úpravy. Přizpůsobení obuvi pacientovi musí být ortopedickým technikem potvrzeno datem, razítkem a stvrzeno podpisem. Odpovídající ověření musí být dodavateli nebo přímo f. Streifeneder ortho.production GmbH předloženo bez žádosti, při uplatnění nároků vyplývajících z této garance.

### 8.2 Délka garance a její omezené trvání

Délka garance od výrobce se liší v závislosti na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Konkrétní podmínky garance pro tento výrobek jsou následující:

Délka garance: 217R1 Obuv pro odlehčení části nohy "Komet" = 3 měsíce

Nároky vyplývající z této garance musí být neprodleně písemně uplatněny u dodavatele nebo přímo u f. Streifeneder ortho.production GmbH, a to nejpozději do 1 měsíce od zjištění nároku dle této garance.

Právo uplatňovat nároky na garanci po uplynutí této lhůty jsou výslovně vyloučeny.

### 8.3 Rozsah záruky a vyloučení

Je zaručeno, že výrobek je bez materiálových a výrobních vad.

Garance se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- chybného přizpůsobení a aplikace,
- chybné manipulace,
- nevhodného použití (zejména v rozporu s danými pokyny výrobce),
- běžného opotřebení,
- vnějších vlivů (např. vyšší moc nebo zásahy ze strany třetích osob).

Stejně tak nejsou zahrnuty optické vady bez vlivu na funkčnost daného výrobku, rovněž vady vyplývající z kombinace poškozených komponentů, použitím komponentů neschválených f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo zásahy či opravami prováděnými neautorizovaným prodejcem f. Streifeneder ortho.production GmbH.

Tato garance nevytváří závazky vůči f. Streifeneder ortho.production GmbH a dodavateli, pokud se jedná o náhradu následné škody nebo poškození jakéhokoli druhu či jiných nároků na náhradu škody. Výjimkou jsou závazné právní předpisy, dle kterých f. Streifeneder ortho.production GmbH nad rámec dobrovolné garance ručí.

### 8.4 Garanční servis

Jsou-li splněny všechny podmínky této garance f. Streifeneder ortho.production GmbH na základě vlastního uvážení výrobek opraví nebo vymění zdarma.

## **9 Prohlášení o shodě**

Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že 217R1 Obuv pro odlehčení části nohy "Komet" je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EEC.

## **10 Likvidace**

Výrobek je pro člověka a životní prostředí nezávadný a lze jej recyklovat. Výrobek musí být zlikvidován nebo zrecyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Návod k použití je chráněn autorským zákonem. Kopírování kompletního návodu k použití nebo i částí v jakékoliv formě je povoleno pouze s výslovným písemným povolením f. Streifeneder ortho.production GmbH. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou informativní a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení možných mírných odchylek v konstrukci, tvaru, barvě nebo v obsahu balení. Produkty mohou být změněny bez předchozího upozornění po tisku tohoto návodu k použití v 2018-04. Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoliv k nahlédnutí na [www.streifeneder.com/op](http://www.streifeneder.com/op).





**Výrobce:**

Streifeneder  
ortho.production GmbH  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering  
Germany  
T +49 8141 6106-0  
F +49 8141 6106-50  
office@streifeneder.de  
www.streifeneder.de/op

**Prodejce v ČR:**

ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.  
Husova 54  
538 54 Luže  
Tel. +420 469 671 430  
Mob. technik +420 604 669 098  
ortho-aktiv@quick.cz  
www.protetika-ortho-aktiv.cz