



CE

Streifeneder

**Orthopädische
Produktion & Vertrieb**

10A43/A60

< 75Kg / 165 liber

**Posuvný dvojitý adaptér
– aluminium**


F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1



Obr. 2

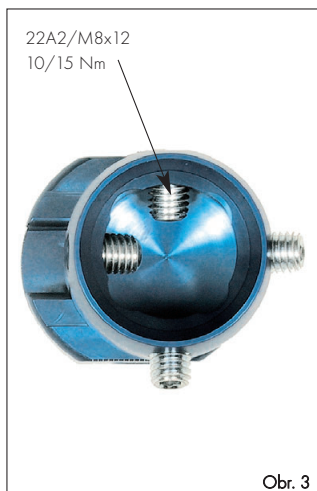

Obr. 3

1. Účel použití

Posuvný adaptér 10A43/A60 se užívá výhradně k protetickému ošetření dolních končetin. Podle klasifikačního systému firmy Streifeneder je doporučován pro pacienty s tělesnou hmotností do 75 kg.

2. Popis

Posuvný adaptér 10A43/A60 představuje spojení mezi dvěma pyramidami a modulární stehenní nebo bérceovou protézou firmy Streifeneder. Vedle funkce jako dvojitý adaptér (jako 10A50) jsou možné další translační nastavení lůžka protézy (Obr.1 a 2).

3. Manipulace se stavěcími šrouby

Pomocí čtyř stavěcích šroubů 22A2/M8x12 je možno přehledně provádět statické korektury kdykoli během konstrukce, při zkoušce, ale i po dokončení protézy. Při výměně jednoho modulu nebo při demontáži je původně nastavená pozice ponechána, jsou-li vyšroubovány pouze dva vedle sebe se nacházející šrouby, a sice ty původně nejvíce zašroubované (Obr. 3).

Pozor!

Při utahování šroubů 22A2/M8x12 dodržujte následující postup:

Nejprve rovnoměrně přitáhněte šrouby momentovým klíčem 173P11 silou 10 Nm. Při dokončování protézy je zajistěte pomocí Loctite 118P35 a jeden po druhém utáhněte na 15 Nm.

4. Nastavení posuvu

Translační nastavení je možno alternativně provádět ve frontální a sagitální rovině.

Horní část adaptéru lze po rybinovém vedení posunout asi o 9 mm, a pak fixovat šrouby 22A2/M6x30 (Obr.2).

Použijte momentový klíč 173P11. Dotahovací moment 15 Nm.

Při dokončování protézy zajistěte šrouby pomocí Loctite 118P35.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný adaptér 10A43/A60 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.