

# Streifeneder

Orthopädische  
Produktion & Vertrieb

## 16A9/M10

< 150 kg

S.A.C.H. adaptér chodidla  
(hleznový adaptér)  
– ušlechtilá ocel

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering  
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50  
office@striefeneder.de • www.striefeneder.de



Obr. 1

### Rozsah dodávky (viz obrázek 1)

1. adaptér - ušlechtilá ocel -
2. zajišťovací kroužek
3. ocelový šroub 12.9
4. pevnostní lepidlo 300 118P32

### 1. S.A.C.H. adaptér chodidla (hleznový adapter) – ušlechtilá ocel


Tento modulární adaptér chodidla je možné používat výhradně ve spojení s výrobkem S.A.C.H.-Fuss pro muže do 150 kg, druh 30A150.

- kompletní se šrouby
- nerez
- pro lepení doporučujeme lepidlo 118P32


Závít	Hmotnost	Šroub	Max. kg	Obj. č.
M10	139 g	ocel 12.9	150 kg	16A9/M10




Obr. 2

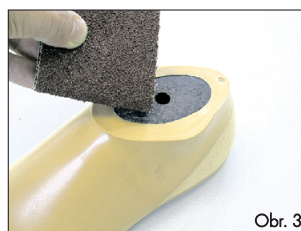

Obr. 3

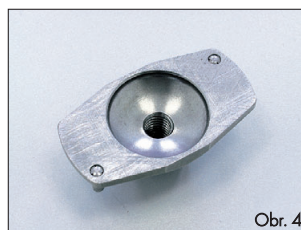

Obr. 4

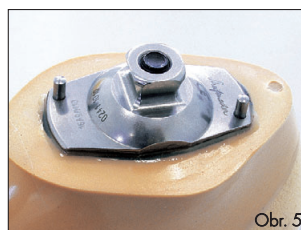

Obr. 5

### 2. Montážní návod


Adaptér chodidla S.A.C.H. 16A9/M10 se montuje pomocí ocelového šroubu a zajišťovacího kroužku.

**⚠** Po vyzkoušení při chůzi je třeba adaptér chodidla 16A9/M10 bezpodmínečně slepit s výrobkem S.A.C.H.-Fuss 30A150.

Brusným papírem zdrsníte spojované plochy a odmastíte ředidlem.

Adaptér chodidla S.A.C.H. má již zdrsněný povrch a je třeba ho odmastit. Před lepením nesmí žádná z částí přijít do kontaktu s prsty nebo s jiným mastným materiálem!

Speciální lepidlo 118P32 namíchejte v předepsaném poměru a naneste ho ve slabé vrstvě na slepované plochy. Části spojte a sešroubujte silou 10 Nm.

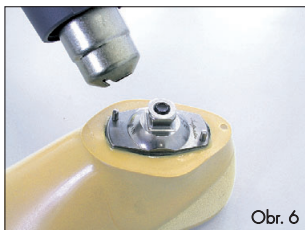

Obr. 6

Proces lepení je možné urychlit přívodem teplého vzduchu do ca. 70°C.



Obr. 7

Po 4 hodinách se ocelový šroub dotáhne dotahovacím momentem 30 Nm. Lepení po 16 hodinách ztvrdne a vydrží plné zatížení. Firma F. G. Streifeneder KG nepřebírá záruku v případě, že adaptér chodidla S.A.C.H. nebyl slepen podle návodu k použití!

### 3. Servis

Podle aktivity pacienta zkontrolujte jednou ročně stav šroubů a lepení z hlediska jejich opotřebení.



Obr. 8

### 4. Nářadí a příslušenství

Doporučujeme momentový klíč 173P11.



Obr. 9

Pro spojení s kosmetickou pěnou doporučujeme spojovací desku S.A.C.H. 29A1.

### Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG zaručuje rozšířenou garanci po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

### Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že adaptér chodidla (hleznový adaptér) z ušlechtilé oceli 16A9/M10 S.A.C.H. odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.