



Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb


30S4/D

Návod k montáži pro 30S1 / 30S2 / 30S3 série zámků 300

Těsnění objímky k sérii zámků 300
pro laminační disky 16A3 a 16A5

F. G. Streifeneder KG · Moosfeldstraße 10 · D-82275 Emmering
Telefon +49 8141 6106-0 · Fax 6106-50
office@streifeneder.de · www.streifeneder.de

1. Dodávka obsahuje (obr.1):

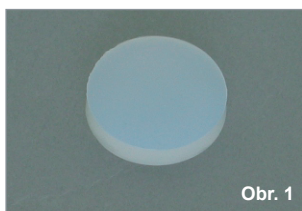

– těsnění objímky série 300, obj. č. 30S4/D

2. Těsnění objímky

je jednoduché aplikovat. Při použití laminačního disku 16A3 nebo 16A5 (bez obrázku) rychle a jednoduše objímku utěsníte.

3. Montáž



Obr. 2 Obr. 2 Demontujte protézu, až zpřístupníte spodní stranu laminačního disku 16A3 (16A5). Plochy spojení očistěte. Čím pečlivěji tak učiníte, tím docílíte většího podtlaku v objímce.



Obr. 3 Obr. 3 Vložte pak těsnicí disk do prohlubně v laminačním disku.



Obr. 4 Obr. 4 Našroubujte příslušný adapter, po stlačení palcem se těsnění objímky utěsní a šrouby lze lépe zavést.



Obr. 5 Obr. 5 Další montáž protézy probíhá obvyklým způsobem.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje záruku po dobu 12 měsíců, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že 30S4/D -těsnění objímky k sérii zámků 300 pro laminační disky 16A3 a 16A5 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.