

## GO.smart



Karbonové chodidlo

5A410/...

Návod k použití

# Obsah

1	Obsah balení .....	3
2	Technická data .....	3
3	Popis a funkce .....	4
4	Stavba .....	4 – 6
4.1	Základní stavba .....	4
4.2	Nastavení při zátěži .....	5
4.3	Dynamické nastavení .....	6
5	Technické údaje .....	6 – 7
5.1	Demontáž/montáž kosmetického krytu .....	6
5.2	Demontáž .....	6
5.3	Montáž .....	7
6	Údržba a servis .....	8
7	Použití .....	8
7.1	Omezení použití .....	8
7.2	Nesprávné použití .....	8
7.3	Doba použití .....	8
8	Garance .....	9 – 10
8.1	Podmínky garance .....	9
8.2	Délka garance a její omezené trvání .....	9
8.3	Rozsah garance a vyloučení .....	10
8.4	Garanční servis .....	10
9	Prohlášení o shodě .....	11
10	Likvidace .....	11

## 1 Obsah balení

Balení obsahuje: 1x 5A410/... GO.smart chodidlo

1x kosmetický kryt s těsnícím kosmetickým krytem

1x Spektra ponožku

1x inbusový klíč

## 2 Technická data

<b>Max. hmotnost pacienta:</b>	viz tabulka
<b>Stupeň aktivity (walky):</b>	1 a 2
<b>Připojení:</b>	pyramidový adaptér
<b>Stavební výška (závislá na velikosti chodidla):</b>	61 – 69 mm (velikost 27)
<b>Váha (včetně kosmetického krytu, těsnícího kosmetického krytu a Spektra ponožky):</b>	cca 594 g (velikost 27)

	max. hmotnost pacienta:			
	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg
velikost 22	✓	✓		
velikost 23	✓	✓	✓	
velikost 24	✓	✓	✓	✓
velikost 25	✓	✓	✓	✓
velikost 26	✓	✓	✓	✓
velikost 27	✓	✓	✓	✓
velikost 28		✓	✓	✓
velikost 29			✓	✓



### Použití dle Streifeneder Walky-systému:

Chodidlo 5A410/... Go.smart je schváleno pro stupeň aktivity 1 a 2 a pro maximální tělesnou hmotnost včetně běžně nošených a zvedaných břemen až do 125 kg (v závislosti na velikosti chodidla, viz bod 2 – tabulka).


### 3 Popis a funkce

Chodidlo 5A410/... GO.smart se používá výhradně k protetickému vybavení dolních končetin.


### 4 Stavba

#### 4.1 Základní stavba

Zátěžová linie prochází chodidlem přibližně v 1/3 od paty a ve 2/3 od špičky chodidla.

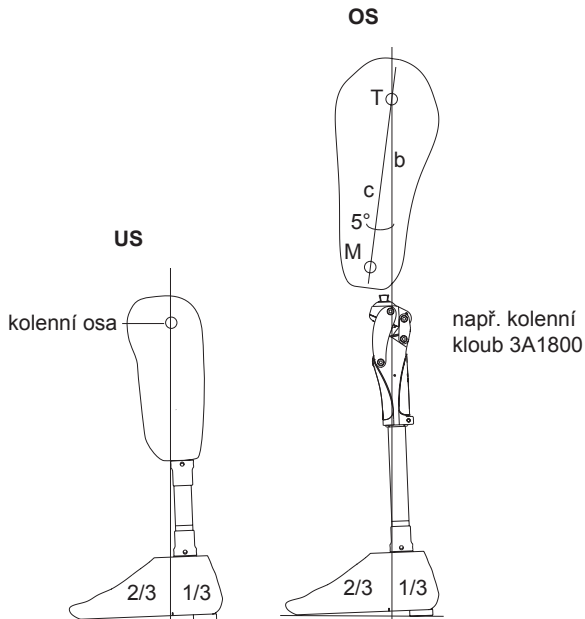


## 4.2 Nastavení při zátěži

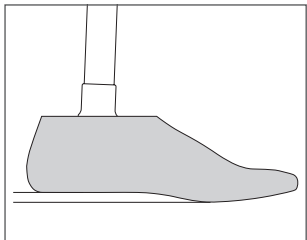


Nechte uživatele postavit s rovnoměrným rozložením hmotnosti na obě chodidla.

Výška podpatku: 0 až max. 10 mm

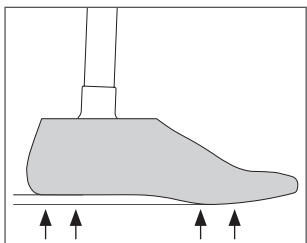

Dbejte na to, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení hmotnosti na přednoží a patu.

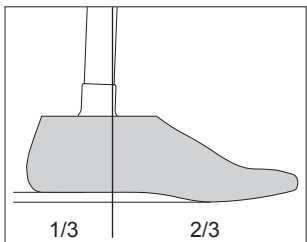

Zkontrolujte zátěžovou linii a zjistěte, zda je v souladu s doporučeným výchozím bodem.

## 4.3 Dynamické nastavení

Požadované hodnoty	Změny v nastavení
tvrdší zpětná vazba prstů	nakloňte chodidlo směrem k plantární flexi nebo posuňte zátěžovou linii směrem dozadu
měkčí zpětná vazba prstů	nakloňte chodidlo ve směru dorsální extenze dozadu nebo posuňte zátěžovou linii směrem dopředu
tvrdší zpětná vazba paty	nakloňte chodidlo ve směru dorsální extenze dozadu nebo posuňte zátěžovou linii směrem dopředu
měkčí zpětná vazba paty	nakloňte chodidlo směrem k plantární flexi nebo posuňte zátěžovou linii směrem dozadu

## 5 Technické údaje

### 5.1 Demontáž/montáž kosmetického krytu

K nazouvání a vyzouvání kosmetiky chodidla použijte montážní lžíci 5M400, která usnadňuje nazutí a vyzutí kosmetického krytu z chodidla.

### 5.2 Demontáž



Při demontáži dbejte na to, aby pata přesahovala přes hranu stolu. To umožní vytažení kosmetiky chodidla a ulehčí se tím vyzutí.

podobný obrázek

### 5.3 Montáž



Zatlačte chodidlo do kosmetiky. Dbejte na to, aby pata dosedla k okraji kosmetiky chodidla.

podobný obrázek



Abyste si usnadnili nasazení kosmetiky chodidla, zaveďte po straně delší konec montážní lžice až pod patu a vpačte chodidlo do kosmetiky.

podobný obrázek



#### **Pozor!**

Spektra ponožka musí být před montáží kosmetiky vždy přetažena přes chodidlo.



#### **Pozor!**

Dbejte na to, aby se chodidlo nedostalo do styku s chemikáliemi podporujícími korozi a nevhodnými látkami jako jsou např. voda slaná nebo sladká, kyseliny, prach nebo písek! Při zanedbání tohoto předpisu nelze od f. Streifeneder ortho.production GmbH ani od dodavatele žádat náhradu.

**Prosím, seznamte s touto podmínkou uživatele!**

## 6 Údržba a servis

Protézové chodidlo je bezúdržbové.



### **Poznámka:**

Obecně platí, že celá protéza by měla být kontrolována na opotřebení každých 6 měsíců. Pokud je to nutné, vyměňte kosmetický kryt nebo Spektra ponožku.

## 7 Použití

Tento produkt vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení uživateli dle indikace. Veškeré mechanické nastavení musí být provedeno odborným a vyškoleným personálem.

### 7.1 Omezení použití

Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, smí být produkt používán pouze jedním uživatelem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí být používán další osobu. Tento produkt nesmí být používán k pravidelným lehkým sportovním aktivitám.



### **Pozor!**

Upozorňujeme na to, že tento produkt byl testován a schválen pouze ve spojení s modulárními díly f. Streifeneder ortho.production GmbH.

### 7.2 Nesprávné použití

Tento produkt je určen výhradně pro pohybovou aktivitu (walky) 1 a 2 a pro maximální tělesnou hmotnost včetně běžně nošených a zvedaných břemen (viz bod 2) a není vhodný pro pravidelné lehké sportovní aktivity (např. skákání, běh, ...).



### **Pozor!**

Maximální zatížení chodidla je omezeno a závisí na použitém dílu s nejnižším hmotnostním limitem. Tento díl určuje maximální hmotnostní zatížení celé protézy. Maximálním hmotnostním zatížením je tělesná hmotnost uživatele včetně běžně nošených a zvedaných břemen (viz bod 2).

### 7.3 Doba použití

Doba použití produktu je omezena na 3 roky.



## **8 Garance**

Následující garance je platná v souladu s jinými relevantními zákony danými garančními nároky a je od těchto nezávislá. Garance je poskytována namísto jakýchkoli jiných vyjádřených nebo nepřímo vyjádřených garancí nebo vhodných garancí pro konkrétní účel.

### **8.1 Podmínky garance**

Nároky vyplývající z garance výrobce lze uplatňovat pouze v případě, že daný produkt byl namontován a seřízen certifikovaným/akreditovaným ortopedickým technikem a v případě, že byl produkt řádně a pravidelně udržován vyškoleným technikem ve stanovených intervalech. Pokud jde o údržbu a předepsané termíny, jsou dány f. Streifeneder ortho.production GmbH. Prováděný servis a údržba musí být potvrzeny datem, razítkem a stvrzeny podpisem provádějící odborné firmy. Odpovídající ověření musí být f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo dodavateli předloženo bez žádosti při uplatnění nároků vyplývajících z této garance.

### **8.2 Délka garance a její omezené trvání**

Délka garance od výrobce se liší v závislosti na typu produktu. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Konkrétní podmínky garance pro tento produkt jsou následující:

Délka garance: 5A410/... GO.smart = 24 měsíců

Délka garance: 5A400/X... Kosmetický kryt = 6 měsíců

Nároky vyplývající z této garance musí být neprodleně písemně uplatněny u f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo u dodavatele, a to nejpozději do 1 měsíce od zjištění nároku dle této garance. Právo uplatňovat nároky na garanci po uplynutí této lhůty je výslovně vyloučeno.

### 8.3 Rozsah garance a vyloučení

Je zaručeno, že výrobek je bez materiálových a výrobních vad.

Garance se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- chybné stavby protézy,
- nedbalé nebo nesprávné montáže,
- nevhodného použití (zejména v rozporu s danými pokyny výrobce),
- běžného a nadměrného opotřebení,
- vnějších vlivů (např. vyšší moc nebo zásahy ze stran třetích osob).

Stejně tak nejsou zahrnuty optické vady bez vlivu na funkčnost daného produktu, rovněž vady vyplývající z kombinace poškozených dílů, použitím dílů neschválených f. Streifeneder ortho.production GmbH nebo zásahy či opravy prováděné neautorizovaným prodejcem f. Streifeneder ortho.production GmbH.

Záruka nevytváří závazky vůči f. Streifeneder ortho.production GmbH a dodavatel, pokud se jedná o náhradu následné škody nebo poškození jakéhokoli druhu či jiných nároků na náhradu škody. Výjimkou jsou závazné právní předpisy, dle kterých f. Streifeneder ortho.production GmbH nad rámec dobrovolné garance za produkt ručí.

### 8.4 Garanční servis

Jsou-li splněny všechny podmínky této garance, f. Streifeneder ortho.production GmbH na základě vlastního uvážení buď produkt opraví nebo vymění zdarma.



#### **Pozor!**

Pro všechny dotazy nebo požadavky vždy uvádějte sériové číslo chodidla (uvedeno na faktuře a etiketě produktu).

Bez sériového čísla není možné Váš požadavek zpracovat.

Velice Vám děkujeme za pochopení.


## **9 Prohlášení o shodě**

Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že chodidlo 5A410/... GO.smart je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EHS.

## **10 Likvidace**

Produkt je pro člověka a životní prostředí nezávadný a lze jej recyklovat. Musí být zlikvidován nebo zrecyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Návod k použití je chráněn autorským zákonem. Kopírování kompletního návodu k použití nebo i částí v jakékoliv formě je povoleno pouze s výslovným písemným povolením f. Streifeneder ortho.production GmbH. Uvedené rozměry a hmotnosti jsou informativní a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení možných mírných odchylek v konstrukci, tvaru, barvě nebo v obsahu balení. Produkty mohou být změněny bez předchozího upozornění po tisku tohoto návodu k použití v 2019-03. Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoliv k nahlédnutí na [www.streifeneder.com/op](http://www.streifeneder.com/op).



**Autorizovaný zástupce a  
prodejce na Slovensku:**

Streifeneder  
ortho.production GmbH  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering  
Germany  
T +49 8141 6106-0  
F +49 8141 6106-50  
office@streifeneder.de  
www.streifeneder.de/op

**Prodejce v ČR:**

ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.  
Husova 54  
538 54 Luže  
Tel. +420 469 671 430  
Mob. technik +420 604 669 098  
ortho-aktiv@quick.cz  
www.protetika-ortho-aktiv.cz

5A410 - CZ 2019-03