



CE

150kg

10A15/S

Rotační adaptér

Obsah

1 Technická data.....	3
2 Popis a funkce.....	3
2.1 Určení použití.....	3
2.2 Konstrukce.....	3
2.3 Funkce.....	3
3 Stavba.....	3
4 Technické údaje.....	4
5 Údržba a servis.....	4
6 Použití.....	4
6.1 Omezení použití.....	4
6.2 Nesprávné použití.....	4
6.3 Doba použití.....	4
7 Garance.....	5
7.1 Délka garance.....	5
7.2 Rozsah garance.....	5
8 Prohlášení o shodě.....	5
9 Likvidace.....	5

1 Technická data

Materiál.....	Ocel
Váha.....	193 gramů
Stavební výška.....	26 mm

Rotační adaptér 10A15/S je schválen pro uživatele stupně aktivity (walky) 1 až 4 a pro maximální hmotnost včetně nošených či vzpíraných břemen do 150 kg.

2 Popis a funkce

2.1 Oblast použití

Rotační adaptér 10A15/S je určen výhradně k vybavení modulárních protéz dolních končetin. Oblasti použití jsou stehenní amputace a exartikulace v kyčelním kloubu.

2.2 Konstrukce

Rotační adaptér 10A15/S spojuje protézové lůžko s modulárními díly protézy. Tím jsou stavební díly otočné a k sobě uzamykatelné pomocí blokovacího mechanismu. Po uvolnění může být protézové lůžko otočeno o 360°.

2.3 Funkce

Pro rotaci stlačte blokovací tlačítko, viz obr. K zablokování adaptéru dojde automaticky, a to vždy ve výchozí poloze.



3 Stavba



Otočný adaptér 10A15/S musí být vždy nastaven do protézy blokovacím tlačítkem na mediální nebo laterální pozici.

4 Technické údaje

Díky klasickému připojení přes pyramidu rotační adaptér 10A15/S umožňuje obvyklé proximální a distální nastavení. K utahování stavěcích šroubů používejte kalibrovaný momentový klíč (173P11).



Stavěcí šrouby musí být zajištěny pomocí Loctite (118P35) a utaženy na 15Nm.



Je nutné dbát na to, aby rotační adaptér 10A15/S nepřišel do styku s látkami či předměty způsobujícími korozi jako je voda a slaná voda, kyseliny, prach či písek. Nedodržení tohoto doporučení povede ke ztrátě nároku na reklamaci či jakoukoli kompenzaci ze strany Streifeneder ortho.production GmbH. Prosím, informujte o tom uživatele protézy.

5 Údržba a Servis

Všechny pohyblivé části musí být vizuálně a funkčně kontrolovány po 6-ti měsících, stejně jako všechny pevné modulární komponenty po 12-ti měsících.

6 Použití

Rotační adaptér 10A15/S vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení uživateli v závislosti na indikaci, které musí být provedeno odborným a vyškoleným personálem.

6.1 Omezení použití

Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, berte prosím na vědomí, že výrobek smí být užíván pouze jedním pacientem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí být užíván další osobou.



Upozorňujeme na to, že rotační adaptér 10A15/S byl testován a schválen pouze ve spojení s modulárními a stavebními díly firmy Streifeneder.

6.2 Nesprávné použití

Rotační adaptér 10A15/S je dimenzován pro uživatele aktivity 1 až 4 dle walky klasifikačního systému a pro maximální tělesnou hmotnost do 150 kg (včetně vzpíraných a nošených břemen). Není vhodný pro sportovní aktivity (například pro skákání).

6.3 Doba použití

Doba použití je omezena na 5 let.

7 Garance

7.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Pro tento produkt, rotační adaptér 10A15/S, je garance 12 měsíců.

7.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, nebo pod jejich vedením, spojen s ostatními díly protézy a přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen, nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly. Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho.

Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození.

8 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený výrobek rotační adaptér 10A15/S je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EEC.

9 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce :

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:

Ortho - Aktiv spol. s r. o.
Husova 54
538 54 Luže
tel. +420 469 671 430
mobil technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
technik@protetika-ortho-aktiv.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz