



Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

16A3


< 100 kg / 220 liber

Laminační disk, kulatý
pro sérii zámků 300


F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1

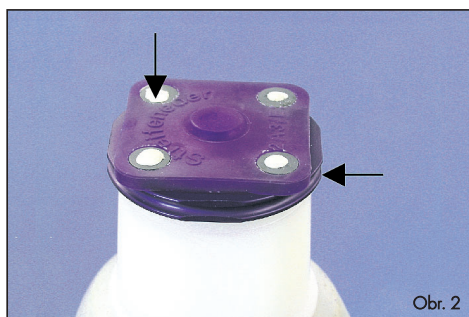

Obr. 2

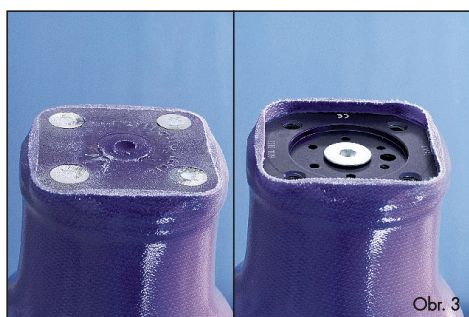

Obr. 3

1. Laminační disk, kulatý

Laminační disk 16A3 tvoří spojení mezi sérií zámků 300 a modulárním systémem firmy Streifeneder. Dodávka obsahuje všechny potřebné šrouby, jakož i laminační krytku 22A13. Díky laminační krytce se značně zjednodušuje vestavění laminačního disku. Krytka díky svému přesně zapadávajícímu tvaru bezpečně utěsňuje a vytváří volný čtvercový prostor pro všechny čtyřdřevé adaptéry. Laminační disk je přitom bezpečně zalit v laminátu.

2. Návod k montáži

Obrázek 1

Lehce namažte příkládací plochy laminační krytky 22A13 a vložte je do laminačního disku. Zatláčení palcem ve střední části umožní uniknout vzduch. Utáhněte čtyřmi namazanými zapuštěnými šrouby tak, aby bylo přiložení těsné.

Obrázek 2

Vnitřní šestihran zapuštěných šroubů vyplňte plastelínou 113P7.

Při armování musí být armovací materiál v drážce laminačního disku ováznán!

Obrázek 3

Po vytvrzení laminátu odkryjte plošným broušením laminační krytku a sejměte ji.

Okraj kolem laminační krytky se nesmí obrušovat do roviny. Poskytuje laminačnímu disku potřebné uchycení a zvyšuje stabilitu.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že laminační disk 16A3 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.