

Silikon-Liner

Silikonové návleky

1. Určení velikosti silikonového návleku

Změřte distální obvod přibližně 4 cm od konce pahýlu. První dvojčíslí udává výchozí velikost.

Například změřený obvod 28 cm = velikost 28.

Objednáte tedy silikonový návlek bez potažení látkou takto:

- ┌ při prvovybavení o 2 až 3 čísla menší
- └ při dalších vybaveních o 1 až 2 čísla menší

Silikonový návlek s látkovým potahem objednáte takto:

- ┌ při prvovybavení o 1 až 2 čísla menší
- └ při dalších vybaveních o 0 až 1 číslo menší

Považujte, prosím, takto určené velikosti jako informativní doporučení, protože rozhodující je pacient.

2. Správná délka matrice (látkového vyztužení) silikonového návleku

Přesná délka pahýlu a jeho kostnatá struktura je rozhodující pro výběr délky látkového vyztužení vhodného návleku.

Doporučuje se dodržet:

- ┌ přesah minimálně 6 cm do kostnaté struktury
- └ se zakončením maximálně pod hlavičkou fibuly

Zvláštní provedení:

Můžeme vám vyrobit návlek s 5 cm matricí (látkovým vyztužením) pro velmi krátké pahýly a až 18 cm matricí pro pahýly dlouhé

Upozornění:

Vnitřní látkové vyztužení nesmí být při zkracování návleku poškozeno!

Pokud byste nemohli kvůli délce pahýlu aplikovat návlek s 10 cm látkovým vyztužením, můžete si u nás objednat návlek s délkou matrice na míru!

3. Zastřížení silikonového návleku

- ┌ odstříhnete okraj pomocí nůžek s vlnitým profilem 166P35 podle vašich představ,
- └ struktura tkaniny jištěná proti páráni dovoluje individuální zastřížení návleku